

保守点検・修理 報告書

機器名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ Ver. 3.1	製造番号: <u>301250</u>
サービスマニュアル	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒ Ver. 3.1	作業日: <u>2020年10月16日</u>
Ver (版番号)	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐ Ver. 1.0	作業時間: <u>1</u> Hr
顧客名	<u>広島中央健診所</u> 様	TEL: <u>082-228-1177</u>
所在地	<u>広島市中区ハ丁堀 10-10</u>	ご担当 <u>宮田</u> 様
販売店	<u>(株) エパルス</u> 様	ご担当 <u>末田</u> 様
納入年月日	<u>2017年8月24日</u> 保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☒ <u>4年6回目</u> 定期点検シール記入 ☒	
出張/引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容	異常履歴	有 ☒ 無 ☐	シャワー	有 ☒ 無 ☐
<u>保守点検</u>			分解	有 ☒ 無 ☐

不具合原因、作業内容
<u>下記部品交換</u>

点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 <u>621</u>
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 <u>0.68 ppm</u>
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールドチューブ	正常 ☒
		プログラムver	正常 ☒ Ver <u>0207/703C</u>

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項
<u>特に問題等ありませんでした。いつもキレイに使用して頂きありがとうございます</u>

装置	交換後運転回数: <u>1832</u>	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌/消毒: <u>17742</u>	殺菌/消毒+アル: <u>6502</u>
情報	リークチェック: <u>4688</u>	自己洗浄: <u>767</u>	アルコール単独: <u>126</u>	エア単独: <u>2</u>

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒	1	マニホールドチューブ	☐	一式
交換後No <u>16032252</u>			濃度計フィルター	☒	1	排水フィルター 旧・新	☐	1
オゾンセンサー	☒	1	排水栓	☒	1	給水フィルター	☐	1
No <u>200421-006</u>			水槽側コネクタ	☒	2	基板	☐	1
	☐		チューブ側コネクタ	☒	2	タッチパネル	☐	1
	☐		吸盤	☒	3	針子 <u>キップ</u>	☒	

お客様ご確認署名欄
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用致しません。
ご署名 <u>宮田恵子</u>

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
 広島県広島市西区庚午中4-10-36
 TEL: 082-275-0740

責任技術者	作者
増原	青木