

保守点検・修理 報告書

機器名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ Ver. 3.1	製造番号: 500415
サービスマニュアル	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐ Ver. 3.1	作業日: 2020 年 10 月 16 日
Ver (版番号)	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☒ Ver. 1.0	作業時間: 1.5 Hr
顧客名	高田 フリニッ 様	TEL: 0820-24-1212
所在地	山口県柳井市南町 1-11-5	ご担当 様
販売店	テ-エス30フレックス (株) 様	ご担当 飛馬 様
納入年月日	2019 年 9 月 14 日	保証期間 内 ☒ 外 ☐
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ / 年 / 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容	異常履歴 (有) 無	シャワー (有) 無
定期保守点検 (初年度サービス)	1/24 給水異常 (R202)	分解 (有) 無
	2/27 洗浄異常 (R207)	

不具合原因、作業内容
下記部品の交換

点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ パルス数 605
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.73 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒	電源コード 正常 ☒
トレイ 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	マニホールドチューブ 正常 ☒
	プログラム ver Ver 0304 / TRA

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項
1/24 に異常発生、交換作業を実施。交換後正常動作を確認。また、11月27日に交換作業を実施。交換後正常動作を確認。

装置情報	交換後運転回数: 1192	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌/消毒: 1/205	殺菌/消毒+アル: 1/258
	リークチェック: 1187	自己洗浄: 298	アルコール単独: 1	エア単独: 1

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒	1	マニホールドチューブ	☐	一式
交換後No 18037105			濃度計フィルター	☒	1	排水フィルター 旧・新	☐	1
オゾンセンサー	☒	1	排水栓	☒	1	給水フィルター (Plus)	☒	1
No 141112-015			水槽側コネクタ	☐	2	基板	☐	1
	☐		チューブ側コネクタ	☐	2	タッチパネル	☐	1
	☐		吸盤	☒	3		☐	

お客様ご確認署名欄
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用致しません。
ご署名 高田 一英

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
 広島県広島市西区庚午中4-10-36
 TEL: 082-275-0740

責任技術者	作業者
高田 一英	飛馬