

保守点検・修理 報告書

機器名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐	Ver. 3.1	製造番号: 300977
サービスマニュアル	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	Ver. 3.1	作業日: 2020年10月20日
Ver (版番号)	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐	Ver. 1.0	作業時間: 1 Hr
顧客名	近藤医院 様		TEL: 0827-95-0070
所在地	山口県岩国市美和町佐項 370-1		ご担当 様
販売店	(株) セウエー 様		ご担当 様
納入年月日	2016年9月20日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 4年4回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容	異常履歴 (有) 無	シャワー (有) 無
定期保守点検	排水故障、異常	分解 (有) 無
		水分解あり変更

不具合原因、作業内容
下記部品交換、排水フィルター取付

点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒ 312	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ パルス数 395
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒	電源コード 正常 ☒
トレイ 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	マニホールドチューブ 正常 ☐
	プログラム ver Ver 02071703c

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項
特に異常は見られず。大変素晴らしい御使用頂き有難うございます。

装置情報	交換後運転回数: 81	更新 (リセット) (実施) ・未実施	殺菌/消毒: 1/61	殺菌/消毒+アル: 1265
	リークチェック: 0	自己洗浄: 232	アルコール単独: 0	エア単独: 2

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒	1	マニホールドチューブ	☐	一式
交換後No 11070722	☒	1	濃度計フィルター	☒	1	排水フィルター 旧・新	☐	1
オゾンセンサー	☒	1	排水栓	☒	1	給水フィルター	☐	1
No 150212-005	☒	1	水槽側コネクタ	☐	2	基板	☐	1
	☐		チューブ側コネクタ	☐	2	タッチパネル	☐	1
	☐		吸盤	☒	3		☐	

お客様ご確認署名欄
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用致しません。
ご署名 近藤 栄 作藤 延

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
 広島県広島市西区庚午中4-10-36
 TEL: 082-275-0740

責任技術者	作業者
瑞 良	拓 規