

保守点検・修理 報告書

機器名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ Ver. 3.1	製造番号: 30/368
サブ・スマニアル	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒ Ver. 3.1	作業日: 2020年10月28日
Ver (版番号)	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐ Ver. 1.0	作業時間: 1 Hr
顧客名	岩国市立美和病院 様	TEL: 0827-96-1155
所在地	岩国市美和町 渡前 1776	ご担当 様
販売店	ラーエスアルフレック (株) 岩国 様	ご担当 小池 様
納入年月日	2017 年 10 月 19 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 3 年 3 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容	異常履歴 有・無 ☒	シャワー 有・無 ☒
保守点検		分解 有・無 ☒

不具合原因、作業内容
下記部品交換、排水フィルター清掃、総合水フィルター交換 試運転実施 (貴院在庫品より)

点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒ 180	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 599
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☐
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールドチューブ	正常 ☒
		プログラムver	正常 ☒ Ver 0207/ T03C

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項
特に問題等ありませんでした。いつもキレイにご使用頂きありがとうございます。

装置情報	交換後運転回数: 137	更新 (リセット) 実施・未実施 ☒	殺菌/消毒: 159	殺菌/消毒+アル: 1384
	リークチェック: 0	自己洗浄: 273	アルコール単独: 1	エア単独: 1

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒	1	マニホールドチューブ	☐	一式
交換後No 15092132			濃度計フィルター	☒	1	排水フィルター 旧・新	☐	1
オゾンセンサー	☒	1	排水栓	☒	1	給水フィルター	☒	1
No 131107-014			水槽側コネクタ	☐	2	基板	☐	1
	☐		チューブ側コネクタ	☐	2	タッチパネル	☐	1
	☐		吸盤	☒	3	接続チューブ 鉗子口 (ゴム部)	☒	1

お客様ご確認署名欄
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用致しません。
ご署名 沖本 絹子

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
 広島県広島市西区庚午中4-10-36
 TEL: 082-275-0740

責任技術者	作業者
増原	青木