

保守点検・修理 報告書

機器名	オゾン水内視鏡殺菌機	OED-1000	☐	Ver. 3.1	製造番号: 500027
サービスマニュアル	オゾン水内視鏡消毒機	OED-1000S	☒	Ver. 3.1	作業日: 2020年12月8日
Ver (版番号)	オゾン水内視鏡洗浄消毒機	OED-1000S Plus	☐	Ver. 1.0	作業時間: 1.0 Hr
顧客名	小田外科医院様				TEL 281-2802
所在地	広島市南区段原山崎2-9-22				ご担当 様
販売店	藤井医療器(株)様				ご担当 氏名 様
納入年月日	2015年4月30日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	7年 2回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☒	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容	異常履歴	有・無	シャワー	有・無
・保守点検	内部止水栓有り		分解	有・無
			給・排水F	有・無

不具合原因、作業内容
・下記部品交換
排水バルブ・ポンプ・逆止弁等交換 (サビ)

点検項目	
フタロック	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒
水漏れ確認	正常 ☒
清掃	正常 ☒
トレー	正常 ☒ 左上にサビ有り
殺菌槽コネクタ	正常 ☒
殺菌槽 LED	正常 ☒
エアライン	正常 ☒
オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 457
排水栓、排水ライン	正常 ☒
細管送水ライン	正常 ☒
排気ライン	正常 ☒
オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
異常音、振動	正常 ☒
電源コード	正常 ☒
殺菌チューブ類	正常 ☒
マニホールドチューブ	正常 ☒
プログラムver	正常 ☒ Ver 0207 / 702.B

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項
試運転後、特に問題なく動作を確認した。

装置情報	交換後運転回数: 515	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌/消毒: 687	殺菌/消毒+アル: 587
	リークチェック: /	自己洗浄: 40	アルコール単独: 6	エア単独: 2

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒	1	マニホールドチューブ	☐	一式
交換後No 17042727			濃度計フィルター	☒	1	排水フィルター 旧・新	☐	1
オゾンセンサー	☒	1	排水栓	☒	1	給水フィルター	☐	1
No 170223-008			水槽側コネクタ	☒	2	基板	☐	1
	☐		チューブ側コネクタ	☐	2	タッチパネル	☐	1
排水バルブ・ポンプ (一式)	☒	1	吸盤	☒	3	P.L.C-ユニット	☒	1

お客様ご確認署名欄
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用致しません。
ご署名 小田 大祐