

保守点検・修理 報告書

機器名	オゾン水内視鏡殺菌機	OED-1000	☒	Ver. 3.1	製造番号: 100781
サブマニュアル	オゾン水内視鏡消毒機	OED-1000S	☐	Ver. 3.1	作業日: 2020年12月9日
Ver (版番号)	オゾン水内視鏡洗浄消毒機	OED-1000S Plus	☐	Ver. 1.0	作業時間: 1 Hr
顧客名	北村 74277 様				TEL: 0836-21-5406
所在地	山口県宇部市松山町2-6-32				ご担当 様
販売店	海月医療器械(株) 宇部営業所 様				ご担当 小馬 様
納入年月日	2014年8月7日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	6年6回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容	異常履歴	有 ☒ 無 ☐	シャワー	有 ☒ 無 ☐
保守点検			分解	有 ☒ 無 ☐

不具合原因、作業内容
下記部品の交換

点検項目		異常履歴	
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒ 381	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 586
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールドチューブ	正常 ☒
		プログラムver	Ver 01071 T01.A

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項
特に異常は発生していません。

装置情報	交換後運転回数: 468	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌/消毒: 1553	殺菌/消毒+アル: 11786
	リークチェック: 2707	自己洗浄: 628	アルコール単独: 54	エア単独: 1

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒	1	マニホールドチューブ	☐	一式
交換後No 51909282			濃度計フィルター	☒	1	排水フィルター 旧・新	☐	1
オゾンセンサー	☒	1	排水栓	☒	1	給水フィルター	☐	1
No 130111-025			水槽側コネクタ	☐	2	基板	☐	1
	☐		チューブ側コネクタ	☐	2	タッチパネル	☐	1
	☐		吸盤	☒	3		☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用致しません。

ご署名

黒川 貴代

修理業者

新鋭工業 株式会社 広島支店
 広島県広島市西区庚午中4-10-36
 TEL: 082-275-0740

責任技術者

作業者

増原

松本