

保守点検・修理 報告書

機器名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ Ver. 3.1	製造番号: 300674
サービスマニュアル	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒ Ver. 3.1	作業日: 2020 年 12 月 10 日
Ver (版番号)	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐ Ver. 1.0	作業時間: / Hr
顧客名	森本 医院 様	TEL: 0823-56-2225
所在地	広島県 呉市 倉橋町 釣土田 7382-2	ご担当 様
販売店	株式会社 広島メテックス 様	ご担当 木村 様
納入年月日	2015 年 12 月 10 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 5 年 5 回目 定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容	異常履歴 有 ☒ 無 ☐	シャワー 有 ☒ 無 ☐
保守点検実施		分解 有 ☒ 無 ☐

不具合原因、作業内容
下記部品交換
オゾン水濃度計は 2020 年 10 月に交換済みのため、今回は交換してありません。
(No. 16062365)

点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ パルス数 736
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒	電源コード 正常 ☒
トレイ 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	マニホールドチューブ 正常 ☒
	プログラムver 正常 ☒ Ver 0207 / TOLC

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項
特に問題等 ございませんでした。
いつもキレイに使用して頂きありがとうございます。

装置	交換後運転回数: 195	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌/消毒: 1/199	殺菌/消毒+アル: 1/966
情報	リークチェック: 0	自己洗浄: 34/	アルコール単独: 0	エア単独: 1

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計 (2020 10 月交換)	☒	1	オゾン分解触媒	☒	1	マニホールドチューブ	☐	一式
交換後 No 16062365			濃度計フィルター	☒	1	排水フィルター (旧・新)	☒	1
オゾンセンサー	☒	1	排水栓	☒	1	給水フィルター	☐	1
No 150217-003			水槽側コネクタ	☒	2	基板	☐	1
	☐		チューブ側コネクタ	☒	2	タッチパネル	☐	1
	☐		吸盤	☒	3	アルコール抹布 (青)	☒	

お客様ご確認署名欄
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用致しません。
ご署名 松村

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
 広島県広島市西区庚午中4-10-36
 TEL: 082-275-0740

責任技術者	作業者
増原	青木