

保守点検・修理 報告書

管理 No. 2020/214-01

機器名	オゾン水内視鏡殺菌機	OED-1000	☐	Ver. 3.1	製造番号: 300733
サービスマニュアル	オゾン水内視鏡消毒機	OED-1000S	☒	Ver. 3.1	作業日: 2020年12月18日
Ver (版番号)	オゾン水内視鏡洗浄消毒機	OED-1000S Plus	☐	Ver. 1.0	作業時間: 1.0 Hr
顧客名	山内内科 様				TEL 0832-57-1570
所在地	下関市-宮本町2-4-6				ご担当 様
販売店	エスエスエス (株) 下関 様				ご担当 西本 様
納入年月日	2015年12月11日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	5年 ☒ 回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容	異常履歴	シャワー
・保守点検	排水逆流×2	分解
	↓	給・排水F
	ホース交換	

不具合原因、作業内容
・下記部品交換
排水ホース交換済み

点検項目		交換部品	
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールドチューブ	正常 ☒
		プログラムver	正常 ☒

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項
・試運転後、特記事項はなし、終了。

装置情報	交換後運転回数: 165	更新 (リセット) 実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌/消毒: 16	殺菌/消毒+アル: 239
	リークチェック: 248	自己洗浄: 224	アルコール単独: 1	エア単独: 1

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒	1	マニホールドチューブ	☐	一式
交換後No 17022702			濃度計フィルター	☒	1	排水フィルター 旧・新	☐	1
オゾンセンサー	☒	1	排水栓	☒	1	給水フィルター	☐	1
No 180601-002			水槽側コネクタ	☐	2	基板	☐	1
	☐		チューブ側コネクタ	☒	2	タッチパネル	☐	1
	☐		吸盤	☒	3	排水ホース	☒	1

お客様ご確認署名欄
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用致しません。
ご署名 山内 敬

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
 広島県広島市西区庚午中4-10-36
 TEL: 082-275-0740

責任技術者	作業者
増原	松本