

保守点検・修理 報告書

管理 No.

06-212101-01

発行日: 2021 年 / 月 26 日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus		製造番号:	500064
作業年月日	2021 年 / 月 29 日		作業時間:	2 Hr
顧客名	加納内科消化器科 様		TEL:	0848-47-3200
所在地	広島県尾道市高須町3659-1		ご担当	様
販売店	福山医療器株式会社		ご担当	藤本 様
納入年月日	2019 年 / 月 16 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 2 年 2 回目		定期点検シール記入	☒
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐		修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

2021年度定期保守点検作業実施

点検項目

フタロック	正常	☒	水槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ パルス数 663
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.76 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒ 清掃 ☒	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	消毒 チューブ類	正常	☒
水槽側コネクタ	正常	☐	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
			運転プログラムバージョン	正常	☒ Ver. 0304 / T124

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

特に問題ありません。

装置 情報	交換後運転回数: 185 更新 (リセット) 実施・未実施	消毒 (総運転回数): 8 / 消毒 (洗剤洗浄あり): 5	
	消毒 + アル (総運転回数): 398	/ 消毒 + アル (洗剤洗浄あり): 397	
	リークチェック: 401	自己洗浄: 351	7L コール単独: 0

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒ 1	吸盤	☒ 1
交換後 No.			排水栓	☒ 1	エアフィルター	☒ 1
オゾンセンサー	☒	1	接続コネクタ; チューブ側	☒ 1	水フィルター	☒ 1
	☐		オゾン水濃度計用フィルタ	☒ 1		☐
				☐		☐

お客様ご確認署名欄

年 月 日

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

ご署名

加納 俊彦 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
広島県広島市西区庚午中4-10-36
TEL: 082-275-0740

責任技術者

作業者

増原

増原