

保守点検・修理 報告書

管理 No. 06-212102-01
発行日: 2021 年 2 月 8 日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus		製造番号: 500226
作業年月日	2021 年 2 月 9 日		作業時間: 1.5 Hr
顧客名	前原病院 様		TEL: 084-925-1086
所在地	広島県福山市手城町1丁目3-41		ご担当 様
販売店	株式会社ミヤノメディックス		ご担当 今岡 様
納入年月日	2019 年 2 月 22 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 2 年 2 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
E209 x10	
不具合原因、作業内容	
2021年度定期保守点検作業実施	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	水槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ バルブ数 867
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒ 蛇口より水出	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.75 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード 正常 ☒
トレイ 正常 ☒	消毒 チューブ類 正常 ☒
水槽側コネクタ 正常 ☒	マニホールド周辺チューブ 正常 ☒
☐	運転プログラムバージョン 正常 ☒ Ver. 1
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項	
特に問題ありません。	

装置 情報	交換後運転回数: 120 更新 (リセット) 実施 ・ 未実施		消毒 (総運転回数): 11 / 消毒 (洗剤洗浄あり): 10	
	消毒+アル (総運転回数): 281		消毒+アル (洗剤洗浄あり): 280	
	リークチェック: 0	自己洗浄: 262	アルコール単独: 1	エア単独: 0

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒ 1	吸盤	☒ 2
交換後 No. 18113375			排水栓	☒ 1	エアフィルター	☒ 1
オゾンセンサー	☒	1	接続コネクタ; チューブ側	☒ 2	水フィルター	☒ 1
	☐		オゾン水濃度計用フィルタ	☐		☐
				☐		☐

お客様ご確認署名欄	2021 年 2 月 9 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
ご署名 市川 繁希	印

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
広島県広島市西区庚午中4-10-36
TEL: 082-275-0740

責任技術者	作業者
増原	増原