

保守点検・修理 報告書

管理 No. 06-202007-04
発行日: 2021年 2月 12日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐		製造番号: 100060
作業年月日	2021 年 2 月 16 日		作業時間: / Hr
顧客名	藤田内科医院 様		TEL: 0848-20-7133
所在地	広島県尾道市長江1-23-8		ご担当 様
販売店	株式会社夢和コンサルタント		ご担当 川西 様
納入年月日	2010 年 10 月 21 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 10 年 9 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
不具合原因、作業内容	
2021年定期メンテナンス実施	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ バルブ数 486
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード 正常 ☒
トレイ 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	マニホールド周辺チューブ 正常 ☒
作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項	
151102-005 ポンプ以外は特に問題ありません。 52004149 0107/T01.A	

装置 情報	交換後運転回数: 19	更新 (リセット) 実施 ・ 未実施	殺菌/消毒: 27	殺菌/消毒+7L: 777
	リークチェック: 0	自己洗浄: 552	アルコール単独: 2	エア単独: 9

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ポン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	2
排水栓		☒	1	接続コネクタ: 水槽側		☒	2
ポン水濃度計		☒	1	接続コネクタ: チューブ側		☒	2
ポン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄	R3 年 2 月 16 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	(医) 藤田内科医院
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	ご署名 藤田道雄

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
広島県広島市西区庚午中4-10-36
TEL: 082-275-0740

責任技術者	作業者
増原	増原