

保守点検・修理 報告書

機器名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐	Ver. 3.1	製造番号: 500253
サビ・スミアブル	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐	Ver. 3.1	作業日: 2021年3月11日
Ver (版番号)	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☒	Ver. 1.0	作業時間: 1.5 Hr
顧客名	兼清外科 様		TEL: 0833-71-0800
所在地	山口県光市浅江 3-1-25		ご担当 様
販売店	海井医科器械(株) 周南営業所 様		ご担当 高尾 様
納入年月日	2019年3月29日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 2年2回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容	異常履歴 ☒ 有・無	シャワー ☒ 有・無
定期保守点検	12/16 E302 濃度維持異常	分解 ☒ 有・無

不具合原因、作業内容
下記部品交換

点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ パルス数 1090
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.73 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒	電源コード 正常 ☒
トレイ 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	マニホールドチューブ 正常 ☒
	プログラムver 正常 ☒ Ver 0304/ T12A

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項
特に問題等ありませんでした。キレート液使用頂きおまかせいたします。

装置	交換後運転回数: 50	更新(リセット)実施・未実施	殺菌/消毒: 13	殺菌/消毒+7L: 1114
情報	リークチェック: 0	自己洗浄: 8	7L単独: 0	エア単独: 2

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒	1	マニホールドチューブ	☐	一式
交換後No 13121638			濃度計フィルター	☒	1	排水フィルター 旧・新	☐	1
オゾンセンサー	☒	1	排水栓	☒	1	給水フィルター	☐	1
No 120904-001			水槽側コネクタ	☒	2	基板	☐	1
水フィルター	☒		チューブ側コネクタ	☒	2	タッチパネル	☐	1
エプフィルター	☒		吸盤	☒	3		☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用致しません。

ご署名

兼清 様

修理業者

新鋭工業 株式会社 広島支店
 広島県広島市西区庚午中4-10-36
 TEL: 082-275-0740

責任技術者

作業者

増原

青木