

保守点検・修理 報告書

機器名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐	Ver. 3.1	製造番号: 300822
サブマニュアル	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	Ver. 3.1	作業日: 2021年4月7日
Ver (版番号)	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐	Ver. 1.0	作業時間: 1 Hr
顧客名	吉野内科 様		TEL: 089-979-5123
所在地	愛媛県松山市平田町19-2		ご担当 様
販売店	大和産業工業(株) 様		ご担当 仙頭 様
納入年月日	2016年3月29日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 5年5回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容	異常履歴 (有)・無 (有)・無	シャワー (有)・無 (有)・無
保守点検	排水障害 F-111	分解 (有)・無 (有)・無

不具合原因、作業内容
下部部品の交換

点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒ 301	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 479
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.21 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールドチューブ	正常 ☒
		プログラムver	Ver 02071 T02C

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項
特に異常は発生せず、不具合は修理完了です。

装置情報	交換後運転回数: 198	更新(リセット) 実施・未実施	殺菌/消毒: 1/121	殺菌/消毒+アル: 1/1012
	リークチェック: 1/1374	自己洗浄: 199	アルコール単独: 6	エア単独: 8

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒	1	マニホールドチューブ	☐	一式
交換後No 11020585	☒		濃度計フィルター	☒	1	排水フィルター (旧・新)	☒	1
オゾンセンサー	☒	1	排水栓	☒	1	給水フィルター	☐	1
No 180115-005	☒		水槽側コネクタ	☒	2	基板	☐	1
	☐		チューブ側コネクタ	☐	2	タッチパネル	☐	1
	☐		吸盤	☒	3		☐	

お客様ご確認署名欄
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用致しません。
ご署名 下木 幸治

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
 広島県広島市西区庚午中4-10-36
 TEL: 082-275-0740

責任技術者	作業者
増田 昇	松田 健