

保守点検・修理 報告書

機器名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ Ver. 3.1	製造番号: 300/89
サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒ Ver. 3.1	作業日: 2021 年 4 月 21 日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐ Ver. 1.0	作業時間: / Hr
顧客名	なかはら 外科医院 様	TEL: 083-258-0257
所在地	山口県下関市安岡駅前 1-10-27	ご担当 様
販売店	(有) 新和医科器械 様	ご担当 様
納入年月日	2014 年 3 月 18 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 7 年 7 回目 定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容	異常履歴 有・無	シャワー 有・無
保守点検	E402 排水異常 2/14 E200 酸素動力異常 2/35	分解 有・無

不具合原因、作業内容
下記部品交換 試運転実施

点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ パルス数 593
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒	電源コード 正常 ☒
トレイ 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	マニホールドチューブ 正常 ☒
	プログラムver 正常 ☒ Ver 0207 / T04C

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項
特に問題等ございませんでした。いつもキレイにご使用頂きありがとうございます。

装置情報	交換後運転回数: 315 更新(リセット)実施・未実施	殺菌/消毒: 1737	殺菌/消毒+アル: 11885
	リークチェック: 1078 自己洗浄: 1622	アルコール単独: /	エア単独: 12

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒	1	マニホールドチューブ	☐	一式
交換後No 5200/002			濃度計フィルター	☒	1	排水フィルター 旧・新	☒	1
オゾンセンサー	☒	1	排水栓	☒	1	給水フィルター	☐	1
No 210127-005			水槽側コネクタ	☒	2	基板	☐	1
	☐		チューブ側コネクタ	☒	2	タッチパネル	☐	1
	☐		吸盤	☒	3		☐	

お客様ご確認署名欄	ご署名
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	武市 法子
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用致しません。	