

保守点検・修理 報告書

機器名	オゾン水内視鏡殺菌機	OED-1000	☐	Ver. 3.1	製造番号: 30088 /
サービスマニュアル	オゾン水内視鏡消毒機	OED-1000S	☒	Ver. 3.1	作業日: 2021年4月7日
Ver (版番号)	オゾン水内視鏡洗浄消毒機	OED-1000S Plus	☐	Ver. 1.0	作業時間: 1 Hr
顧客名	徳山病院 様				TEL: 0834-21-3750
所在地	山口県周南市南浦山町5番14号				ご担当 様
販売店	富士フィルムメディカル株式会社 山口営業所 様				ご担当 澤久 様
納入年月日	2016年5月30日		保証期間 内 ☐ 外 ☒		付属品
作業区分	保守点検 ☐	総合点検 ☐	年 回目		定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☒	その他 ☐		修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容	異常履歴	シャワー
簡易点検	E300	分解
	E203 E202	有・無
	E101	

不具合原因、作業内容
各点検、試運転実施

点検項目	
フタロック	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒
水漏れ確認	正常 ☒
清掃	正常 ☒
トレー	正常 ☒ ビビあり
殺菌槽コネクタ	正常 ☒
殺菌槽 LED	正常 ☒
エアライン	正常 ☒
オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 150
排水栓、排水ライン	正常 ☒
細管送水ライン	正常 ☒
排気ライン	正常 ☒
オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
異常音、振動	正常 ☒
電源コード	正常 ☒
殺菌チューブ類	正常 ☒
マニホールドチューブ	正常 ☒
プログラムver	正常 ☒ Ver 0207 / T02C

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項
特に問題等ありませんでした。ハットキレに使用頂きありがとうございます。

装置	交換後運転回数: 673	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌/消毒: 11740	殺菌/消毒+AL: 1734
情報	リークチェック: 1	自己洗浄: 308	アルコール単独: 97	エア単独: 1

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☐	1	オゾン分解触媒	☐	1	マニホールドチューブ	☐	一式
交換後No			濃度計フィルター	☐	1	排水フィルター	旧・新	☐
オゾンセンサー	☐	1	排水栓	☐	1	給水フィルター		☐
No			水槽側コネクタ	☐	2	基板		☐
	☐		チューブ側コネクタ	☐	2	タッチパネル		☐
	☐		吸盤	☐	3			☐

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用致しません。

ご署名 福田 寛子

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
広島県広島市西区庚午中4-10-36
TEL: 082-275-0740

責任技術者	作業者
増原	青木