

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 2021 年 4 月 27 日

販売名 / サ-ビ-システム Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ Ver. 3.1	製造番号 500463
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐ Ver. 3.1	作業年月日 2021 年 4 月 27 日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☒ Ver. 1.0	作業時間 Hr
顧客名	比婆医院 様	TEL:
所在地	広島県 庄原市 中本町 1-3-1	ご担当 様
販売店		ご担当 様
納入年月日	2020 年 1 月 25 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

依頼内容	4/27 10:52 濃度維持異常 (E302) 11:19 ミ (?) 11:29 ヒ-タ-異常 11:30 消毒終了 0.75 ppm																																																
作業内容	濃度維持異常 …… トレが下まて下らず、洗剤剤が残留してオゾン濃度が維持できな せんでした。 ヒ-タ-異常 …… ヒ-タ-が故障しており、交換して使用しました。																																																
点検項目	<table border="1"> <tr> <td>フタロック</td> <td>正常 ☒</td> <td>水槽 LED</td> <td>正常 ☒</td> </tr> <tr> <td>酸素ライン</td> <td>正常 ☒</td> <td>エアライン</td> <td>正常 ☐</td> </tr> <tr> <td>アルコールライン</td> <td>正常 ☐</td> <td>オゾン水濃度計動作</td> <td>正常 ☐ 表示数</td> </tr> <tr> <td>オゾンセンサ</td> <td>正常 ☐</td> <td>排水栓、排水ライン</td> <td>正常 ☒</td> </tr> <tr> <td>給水ライン</td> <td>正常 ☒</td> <td>細管送水ライン</td> <td>正常 ☐</td> </tr> <tr> <td>濃度計流量</td> <td>正常 ☐</td> <td>排気ライン</td> <td>正常 ☐</td> </tr> <tr> <td>水位センサー</td> <td>正常 ☐</td> <td>オゾン濃度</td> <td>正常 ☒ 履歴 0.74 ppm</td> </tr> <tr> <td>水漏れ確認</td> <td>正常 ☐</td> <td>異常音、振動</td> <td>正常 ☐</td> </tr> <tr> <td>清掃</td> <td>正常 ☐ 清掃 ☐</td> <td>電源コード</td> <td>正常 ☐</td> </tr> <tr> <td>トレー</td> <td>正常 ☒</td> <td>殺菌/消毒 チューブ類</td> <td>正常 ☐</td> </tr> <tr> <td>水槽側コネクタ</td> <td>正常 ☐</td> <td>マニホールド周辺チューブ</td> <td>正常 ☐</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>運転プログラムバージョン</td> <td>正常 ☒ Ver. 0303 / T12A</td> </tr> </table>	フタロック	正常 ☒	水槽 LED	正常 ☒	酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☐	アルコールライン	正常 ☐	オゾン水濃度計動作	正常 ☐ 表示数	オゾンセンサ	正常 ☐	排水栓、排水ライン	正常 ☒	給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☐	濃度計流量	正常 ☐	排気ライン	正常 ☐	水位センサー	正常 ☐	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.74 ppm	水漏れ確認	正常 ☐	異常音、振動	正常 ☐	清掃	正常 ☐ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☐	トレー	正常 ☒	殺菌/消毒 チューブ類	正常 ☐	水槽側コネクタ	正常 ☐	マニホールド周辺チューブ	正常 ☐			運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 0303 / T12A
フタロック	正常 ☒	水槽 LED	正常 ☒																																														
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☐																																														
アルコールライン	正常 ☐	オゾン水濃度計動作	正常 ☐ 表示数																																														
オゾンセンサ	正常 ☐	排水栓、排水ライン	正常 ☒																																														
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☐																																														
濃度計流量	正常 ☐	排気ライン	正常 ☐																																														
水位センサー	正常 ☐	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.74 ppm																																														
水漏れ確認	正常 ☐	異常音、振動	正常 ☐																																														
清掃	正常 ☐ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☐																																														
トレー	正常 ☒	殺菌/消毒 チューブ類	正常 ☐																																														
水槽側コネクタ	正常 ☐	マニホールド周辺チューブ	正常 ☐																																														
		運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 0303 / T12A																																														
作業結果 (完了) 暫定処理など、連絡事項、特記事項																																																	

装置 情報	交換後運転回数: 18	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌/消毒: 7 / 3	殺菌/消毒+7日: 110 / 108
	リークチェック: 108	自己洗浄: 109	7日単独: 1	エア単独: 2

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☐		オゾン分解触媒	☐		吸盤	☐	
交換後 No.			排水栓	☐		ヒ-タ-ASSY	☒	1
オゾンセンサー	☐		接続コネクタ; 水槽側	☐			☐	
	☐		接続コネクタ; チューブ側	☐			☐	
			オゾン水濃度計用フィルタ	☐			☐	

お客様ご確認署名欄	年 月 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。	
ご署名 熊野 大地	印

修理業者 株式会社 IHI アグリテック (旧社名 IHI シパウラ)
岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6
TEL:086-944-6528

責任技術者	作業者
R03.427	中澤
(印)	