

保守点検・修理 報告書

機器名	オゾン水内視鏡殺菌機	OED-1000	☒	Ver. 3.1	製造番号: 100726
サービスマニュアル	オゾン水内視鏡消毒機	OED-1000S	☐	Ver. 3.1	作業日: 2021年6月29日
Ver (版番号)	オゾン水内視鏡洗浄消毒機	OED-1000S Plus	☐	Ver. 1.0	作業時間: / Hr
顧客名	齊藤 医院 様				TEL: 18388-2-2838
所在地	山口県阿武郡阿武町大字奈古 2860-1				ご担当 様
販売店	富士ファルムシステム(株) 様				ご担当 木原 様
納入年月日	2013年5月21日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	8年8回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容	異常履歴	有・無 ☒	シャワー	有・無 ☒
定期保守点検 (8年目)			分解	有・無 ☒

不具合原因、作業内容
下記部品交換 試運転実施

点検項目	
フタロック	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒
水漏れ確認	正常 ☒
清掃	正常 ☒
トレイ	正常 ☒ 若干ヒビあり
殺菌槽コネクタ	正常 ☒
殺菌槽 LED	正常 ☒
エアライン	正常 ☒
オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 587
排水栓、排水ライン	正常 ☒
細管送水ライン	正常 ☒
排気ライン	正常 ☒
オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
異常音、振動	正常 ☒
電源コード	正常 ☒
殺菌チューブ類	正常 ☒
マニホールドチューブ	正常 ☒
プログラムver	正常 ☒ Ver 01071 T030

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項
特に問題等ございませんでした。いつもきれいに御使用頂きありがとうございます

装置	交換後運転回数: 141	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌/消毒: 3071	殺菌/消毒+アル: 8981
情報	リークチェック: 0	自己洗浄: 391	アルコール単独: 1	エア単独: 3

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒	1	マニホールドチューブ	☐	一式
交換後No 52105011			濃度計フィルター	☒	1	排水フィルター 旧・新	☐	1
オゾンセンサー	☒	1	排水栓	☒	1	給水フィルター	☒	1
No 180215-001			水槽側コネクタ	☐	2	基板	☐	1
	☐		チューブ側コネクタ	☐	2	タッチパネル	☐	1
	☐		吸盤	☒	3		☐	

お客様ご確認署名欄	山口県阿武郡阿武町大字奈古2860番地1
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	医療法人 齊藤 医院
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用致しません。	理事長 齊藤 瑛
	署名 齊藤 瑛

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
 広島県広島市西区庚午中4-10-36
 TEL: 082-275-0740

責任技術者	作業者
増原	青木