

## 保守点検・修理 報告書

|       |                                                                                                                               |                                                                       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 機 器 名 | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 <input type="checkbox"/>                                                                                  | 製造番号: 500358                                                          |
|       | オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S <input type="checkbox"/>                                                                                 | 作業日: 2021年7月20日                                                       |
|       | オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus <input checked="" type="checkbox"/>                                                               | 作業時間: 1.0 Hr                                                          |
| 顧 客 名 | 田村医院 様                                                                                                                        | TEL 082-251-4043                                                      |
| 所 在 地 | 広島県広島市南区宇品海岸2-12-25                                                                                                           | ご担当 様                                                                 |
| 販 売 店 | 五洋医療器株式会社 様                                                                                                                   | ご担当 表 様                                                               |
| 納入年月日 | 2019 年 7 月 25 日                                                                                                               | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 2 年 2 回目 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/> | 付属品                                                                   |
| 出張・引取 | 修 理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>       |                                                                       |

|            |      |     |       |     |
|------------|------|-----|-------|-----|
| 不具合状況、依頼内容 | 異常履歴 | 有・無 | シャワー  | 有・無 |
| ・保守点検      |      |     | 分解    | 有・無 |
|            |      |     | 給・排水F | 有・無 |

|            |
|------------|
| 不具合原因、作業内容 |
| ・下記部品交換    |
|            |
|            |

| 点検項目     |                                            |            |                                                     |
|----------|--------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|
| フタロック    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>     | 殺菌槽 LED    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>              |
| 酸素ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 300 | エアライン      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> JK           |
| アルコールライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>     | オゾン水濃度計動作  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> パルス数 0.27    |
| オゾンセンサ   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>     | 排水栓、排水ライン  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>              |
| 給水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>     | 細管送水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>              |
| 濃度計流量    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>     | 排気ライン      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>              |
| 水位センサー   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>     | オゾン濃度      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.72 ppm  |
| 水漏れ確認    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>     | 異常音、振動     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>              |
| 清掃       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>     | 電源コード      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>              |
| トレー      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>     | 殺菌チューブ類    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>              |
| 殺菌槽コネクタ  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>     | マニホールドチューブ | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>              |
|          |                                            | プログラムver   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> Ver 0504/17A |

|                             |
|-----------------------------|
| 作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項   |
| 1. 特記事項: 洗浄終了後、自己洗浄を実施しました。 |

|    |             |                                                                               |            |              |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| 装置 | 交換後運転回数: 70 | 更新 (リセット) 実施 <input checked="" type="checkbox"/> 未実施 <input type="checkbox"/> | 殺菌/消毒: 12x | 殺菌/消毒+7L: 36 |
| 情報 | リークチェック: 0  | 自己洗浄: 5                                                                       | アルコール単独: 0 | エア単独: 1      |

| 交換部品名称         | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称    | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称      | 交換                       | 数量 |
|----------------|-------------------------------------|----|-----------|-------------------------------------|----|-------------|--------------------------|----|
| オゾン水濃度計        | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | オゾン分解触媒   | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | マニホールドチューブ  | <input type="checkbox"/> | 一式 |
| 交換後No 51912367 |                                     |    | 濃度計フィルター  | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 排水フィルター 旧・新 | <input type="checkbox"/> | 1  |
| オゾンセンサー        | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 排水栓       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 給水フィルター     | <input type="checkbox"/> | 1  |
| No 180208-003  |                                     |    | 水槽側コネクタ   | <input type="checkbox"/>            | 2  | 基板          | <input type="checkbox"/> | 1  |
| エアラインフィルター     | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | チューブ側コネクタ | <input type="checkbox"/>            | 2  | タッチパネル      | <input type="checkbox"/> | 1  |
| 水フィルター         | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 吸盤        | <input checked="" type="checkbox"/> | 3  |             | <input type="checkbox"/> |    |

|                                  |
|----------------------------------|
| お客様ご確認署名欄                        |
| ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。  |
| ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用致しません。 |
| ご署名 田村典子                         |

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店  
 広島県広島市西区庚午中4-10-36  
 TEL: 082-275-0740

| 責任者 | 作業者 |
|-----|-----|
| 増原  | 松本  |