

保守点検・修理 報告書

機 器 名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐	製造番号: 300312	
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		作業日: 2021年5月28日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐		作業時間: 1.0 Hr
顧 客 名	秋山クリニック 様	TEL 082-870-3322	
所 在 地	広島市安佐南区大町東2-12	ご担当 様	
販 売 店	ティーエスアルフレッサ(株) 様	ご担当 末広 様	
納入年月日	2018年8月2日 保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回 目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☒ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容	異常履歴 ☒ 有・無 ☐ シャワー ☒ 有・無 ☐
生成時数多発	E110 5/12, 15, 19, 26 (リセット済)
	分解 ☒ 有・無 ☐
	給・排水F ☒ 有・無 ☐

不具合原因、作業内容	1st 生成時数... 112sec (フィルタ-清掃) 2nd 87sec (配管系統増加) 3rd 84sec (")
前回保守 2021/5/15	

点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ パルス数 F22
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 270 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒	電源コード 正常 ☒
トレイ 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	マニホールドチューブ 正常 ☒
	プログラムver 正常 ☒ Ver /

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数: 156	更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒: 3,262	殺菌/消毒+7L: 2683
	リークチェック: 4,622	自己洗浄: 2,319	7L単独: 6	エア単独: 2

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☐	1	オゾン分解触媒	☐	1	マニホールドチューブ	☐	一式
交換後No			濃度計フィルター	☐	1	排水フィルター 旧・新	☐	1
オゾンセンサー	☐	1	排水栓	☐	1	給水フィルター	☐	1
No			水槽側コネクタ	☐	2	基板	☐	1
	☐		チューブ側コネクタ	☐	2	タッチパネル	☐	1
	☐		吸盤	☐	3		☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用致しません。

ご署名

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
広島県広島市西区庚午中4-10-36
TEL: 082-275-0740

責任者	作業者
増原	松本