

保守点検・修理 報告書

機 器 名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐	製造番号: 301250 左	
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		作業日: 2021年8月19日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐		作業時間: 1.5 Hr
顧 客 名	広島中央健診所 様	TEL 082-228-1177	
所 在 地	広島市中区八丁堀10-10	ご担当 宮田 様	
販 売 店	(株)エバルス 様	ご担当 末田 様	
納入年月日	2017 年 8 月 24 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☒ 年 8 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修 理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容	異常履歴	有・無	シャワー	有・無
・総合保守点検 (1回目)			分解	有・無
			給・排水F	有・無

不具合原因、作業内容
・下記部品交換

点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ パルス数 530
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.67 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒	電源コード 正常 ☒
トレー 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	マニホールドチューブ 正常 ☒
	プログラムver 正常 ☒ Ver 0209/705c

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項
・オゾン水濃度計交換済み

装置 情報	交換後運転回数: 1,671 更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌/消毒: 10.114	殺菌/消毒+7L: 3,399
	リークチェック: 5.198 自己洗浄: 929	アルコール単独: 138	エア単独: 3

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒	1	マニホールドチューブ	☐	一式
交換後No 10083245			濃度計フィルター	☒	1	排水フィルター 旧・新	☐	1
オゾンセンサー	☒	1	排水栓	☒	1	給水フィルター	☐	1
No 210319-006			水槽側コネクタ	☐	2	基板	☒	1
	☐		チューブ側コネクタ	☒	2	タッチパネル	☒	1
	☐		吸盤	☒	3		☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用致しません。

ご署名

宮田 恵子

修理業者

新鋭工業 株式会社 広島支店
 広島県広島市西区庚午中4-10-36
 TEL: 082-275-0740

責任者

増原

作業者

杉 穂