

管理 No. 20210927-01

保守点検・修理 報告書

機 器 名	オゾン水内視鏡殺菌機	OED-1000	☒	製造番号:	100794
	オゾン水内視鏡消毒機	OED-1000S	☐	作業日:	2021年9月7日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機	OED-1000S Plus	☐	作業時間:	1.5 Hr
顧 客 名	原田医院			TEL	877-1581
所 在 地	広島市佐田区川内4-15-18			ご担当	様
販 売 店	富田工業(株)			ご担当	西川 様
納入年月日	2015年7月30日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	7年5回目	定期点検シール記入	☒
出張・引取	修 理 ☒	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付	☒

不具合状況、依頼内容	異常履歴	有・無	シャワー	有・無
・ポンプ故障		不明	分解	有・無
・保守点検に伴う作業			給・排水F	有・無

不具合原因、作業内容
・下記部品交換 (保守点検 ¥70,000 TP基板 ¥20,000 (特別))

点検項目	
フタロック	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒
水漏れ確認	正常 ☒
清掃	正常 ☒
トレー	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒
殺菌槽 LED	正常 ☒
エアライン	正常 ☒
オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 6
排水栓、排水ライン	正常 ☒
細管送水ライン	正常 ☒
排気ライン	正常 ☒
オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
異常音、振動	正常 ☒
電源コード	正常 ☒
殺菌チューブ類	正常 ☒
マニホールドチューブ	正常 ☒
プログラムver	正常 ☒ Ver 0209/TPD

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項
交換後、内部に水が溜まる。半年経過後に点検。水が溜まるのを防ぐ。

装置 情報	交換後運転回数:	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌/消毒:	殺菌/消毒+アル:
	リークチェック:	自己洗浄:	アルコール単独:	エア単独:

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒	1	マニホールドチューブ	☐	一式
交換後No 15052099	☒		濃度計フィルター	☒	1	排水フィルター 旧・新	☐	1
オゾンセンサー	☒	1	排水栓	☒	1	給水フィルター	☐	1
No 15/005-001	☒		水槽側コネクタ	☐	2	基板	☒	1
	☐		チューブ側コネクタ	☐	2	タッチパネル	☒	1
	☐		吸盤	☒	3		☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用致しません。

ご署名

北野

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
広島県広島市西区庚午中4-10-36
TEL: 082-275-0740

責任技術者	作業者
増原	松本