

保守点検・修理 報告書

機 器 名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐	製造番号: 300934
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	作業日: 2021年9月9日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐	作業時間: 1.0 Hr
顧 客 名	岡病院 様	TEL 083-282-0070
所 在 地	山口県下関市小月本町2-15-20	ご担当 様
販 売 店	(株)セイエル下関 様	ご担当 網本 様
納入年月日	2016 年 8 月 3 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 5 年 4 回目 定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修 理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容	異常履歴	有・無 ☒ シャワー ☒ 有・無 ☒
・保守点検		分解 ☒ 有・無 ☒
		給・排水F ☒ 有・無 ☒

不具合原因、作業内容
・下記部品交換

点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 454
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.62 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールドチューブ	正常 ☒
		プログラムver	正常 ☒ Ver 2071 T04c

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項
・材料内蔵等にて修理完了。 2021年11月27日検査済!

装置 情報	交換後運転回数: 0	更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒: 169	殺菌/消毒+アル: 129
	リークチェック: 190	自己洗浄: 94	アルコール単独: 15	エア単独: 2

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☐	1	マニホールドチューブ	☐	一式
交換後No 13031352			脱気フィルター	☐	1	排水フィルター 旧・新	☐	1
オゾンセンサー	☒	1	排水栓	☐	1	給水フィルター	☐	1
No 120522-024			水槽側コネクタ	☐	2	水フィルター ◆Plus	☐	1
基板	☐	1	チューブ側コネクタ	☐	2	エアフィルター ◆Plus	☐	1
タッチパネル	☐	1	吸盤	☐	3		☐	

お客様ご確認署名欄
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用致しません。
ご署名 中村

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
 広島県広島市西区庚午中4-10-36
 TEL: 082-275-0740

責任者	作業者
増原	松本