

保守点検・修理 報告書

機 器 名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐	製造番号: 500587
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐	
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☒	
顧 客 名	木村胃腸科病院 様	TEL 0823-22-2306
所 在 地	広島県呉市三条3-5-22	ご担当 様
販 売 店	深川医療器(株)呉 様	ご担当 高橋 様
納入年月日	2020 年 10 月 1 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 1 年 1 回目 定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修 理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容	異常履歴 ☒ 有・無 ☐ シャワー ☐ 有・無 ☐
・保守点検	E110 X (2) 10/3 分解 ☒ 有・無 ☐
	E207 X (3) (給・排水F) ☒ 有・無 ☐

不具合原因、作業内容
・下記部品交換

点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ パルス数 748
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒	電源コード 正常 ☒
トレイ 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	マニホールドチューブ 正常 ☒
	プログラムver 正常 ☒ Ver 0304 / 7/24

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項
特に問題ありません。

装置 情報	交換後運転回数: 1067	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌/消毒: 452	殺菌/消毒+7L: 615
	リークチェック: 666	自己洗浄: 282	7Lコール単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒	1	マニホールドチューブ	☐	一式
交換後No 51912380			脱気フィルター	☒	1	排水フィルター 旧・新	☐	1
オゾンセンサー	☒	1	排水栓	☐	1	給水フィルター (糸)	☒	1
No 191023-004			水槽側コネクタ	☐	2	水フィルター ◆Plus	☒	1
基板	☐	1	チューブ側コネクタ	☐	2	エアフィルター ◆Plus	☐	1
タッチパネル	☐	1	吸盤	☒	3		☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用致しません。

ご署名 中野 典子

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
広島県広島市西区庚午中4-10-36
TEL: 082-275-0740

責任者	作業者
増原	増原