

保守点検・修理 報告書

機 器 名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐	製造番号 : 500393
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐	
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☒	
顧 客 名	東城病院 様	TEL 08477-2-2150
所 在 地	広島県庄原市東城町川東1463-1	ご担当 様
販 売 店	福山医療器株式会社 様	ご担当 <u>三宅</u> 様
納入年月日	2019 年 9 月 13 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 2 年 2 回目 定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修 理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容	異常履歴 <u>有・無</u> シャワー <u>有・無</u>
・保守点検	<u>3/24 E-302x3</u> 分解 <u>有・無</u>
	給・排水F <u>有・無</u>

不具合原因、作業内容
・下記部品交換

点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 <u>0.23</u>
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 <u>0.72 ppm</u>
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールドチューブ	正常 ☒
		プログラムver	正常 ☒ Ver <u>0304/7124</u>

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項
<u>・オゾン濃度計の交換を行いました。</u>
<u>5.0, 4.9, 0 3.0, 5.1, 9.0</u>

装置 情報	交換後運転回数 : <u>3/9</u>	更新 (リセット) <u>実施</u> ・未実施	殺菌/消毒 : <u>94</u>	殺菌/消毒+7ル : <u>522</u>
	リークチェック : <u>0</u>	自己洗浄 : <u>464</u>	アルコール単独 : <u>0</u>	エア単独 : <u>1</u>

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒	1	マニホールドチューブ	☐	一式
交換後No <u>2083235</u>			脱気フィルター	☒	1	排水フィルター 旧・新	☐	1
オゾンセンサー	☒	1	排水栓	☒	1	給水フィルター	☐	1
No <u>150719-003</u>			水槽側コネクタ	☐	2	水フィルター ◆Plus	☒	1
基板	☐	1	チューブ側コネクタ	☐	2	エアフィルター ◆Plus	☒	1
タッチパネル	☐	1	吸盤	☒	3		☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用致しません。

ご署名 錦郡 京子

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
広島県広島市西区庚午中4-10-36
TEL : 082-275-0740

責任者	作業者
増原	松本