

保守点検・修理 報告書

機 器 名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐	製造番号 : 300390
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	作業日 : 2021 年 10 月 19 日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐	作業時間 : 1.0 Hr
顧 客 名	岸槌医院 様	TEL 0823-21-7627
所 在 地	広島県呉市海岸2-16-12	ご担当 様
販 売 店	(株)エバルス 呉支店 様	ご担当 高瀬 様
納入年月日	2014 年 10 月 23 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 7 年 7 回目 定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修 理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容	異常履歴	有・無 ☒ シャワー ☒ 有・無 ☒
・保守点検		分解 ☒ 有・無 ☒
		給・排水F ☒ 有・無 ☒

不具合原因、作業内容
・下記部品交換
内蔵部品交換

点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ パルス数 522
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒	電源コード 正常 ☒
トレー 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	マニホールドチューブ 正常 ☒
	プログラムver 正常 ☒ Ver 02051702C

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項
特記事項は記載ありません。

装置	交換後運転回数 : 117	更新（リセット）実施・未実施 ☒	殺菌/消毒 : 31	殺菌/消毒+7L : 083
情報	リークチェック : 1	自己洗浄 : 032	アルコール単独 : 0	エア単独 : 1

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒	1	マニホールドチューブ	☐	一式
交換後No 17122929			脱気フィルター	☒	1	排水フィルター 旧・新	☐	1
オゾンセンサー	☒	1	排水栓	☒	1	給水フィルター	☐	1
No 160129-015			水槽側コネクタ	☐	2	水フィルター ◆Plus	☐	1
基板	☐	1	チューブ側コネクタ	☐	2	エアフィルター ◆Plus	☐	1
タッチパネル	☐	1	吸盤	☒	3		☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用致しません。

ご署名

岸槌医院

修理業者

新鋭工業 株式会社 広島支店
 広島県広島市西区庚午中4-10-36
 TEL : 082-275-0740

責任者

作業者

増原

松本