

保守点検・修理 報告書

機器名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ Ver. 3.1	製造番号:	500586
サービスマニュアル	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐ Ver. 3.1	作業日:	2021年10月9日
Ver (版番号)	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☒ Ver. 1.0	作業時間:	/ Hr
顧客名	中郷クリニック東生口診療所 様	TEL:	0845-26-3050
所在地	広島県尾道市因島原町668-1	ご担当	様
販売店	株式会社セイエル 様	ご担当	様
納入年月日	2020年10月13日	保証期間	内 ☐ 外 ☒
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ / 年 / 回目	定期点検シール記入	☒
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容	異常履歴	シャワー
・保守点検	有・無 ☒ 無	有・無 ☒ 無
	E110	分解
	E207	

不具合原因、作業内容
・2021年度保守点検実施

点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ パルス数 960
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒	電源コード 正常 ☒
トレー 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	マニホールドチューブ 正常 ☒
	プログラムver 正常 ☒ Ver 0304/T12A

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項
特に問題ありませんでした。

装置	交換後運転回数: 130	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌/消毒: 120	殺菌/消毒+アル: 111
情報	リークチェック: 1	自己洗浄: 112	アルコール単独: 0	エア単独: 1

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒	1	マニホールドチューブ	☐	一式
交換後No 17022653			濃度計フィルター	☒	1	排水フィルター 旧・新	☐	1
オゾンセンサー	☒	1	排水栓	☒	1	給水フィルター	☐	1
No 141219-001			水槽側コネクタ	☐	2	基板	☐	1
ボアマス (新型)	☒	1	チューブ側コネクタ	☐	2	タッチパネル	☐	1
	☐		吸盤	☒	3		☐	

お客様ご確認署名欄
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用致しません。
ご署名 尾子育恵

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
 広島県広島市西区庚午中4-10-36
 TEL: 082-275-0740

責任技術者	作業者
増原	増原