

保守点検・修理 報告書


発行日：平成 29 年 3 月 27 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号：301071
作業年月日	平成 29 年 3 月 27 日		作業時間：2.0 Hr
顧客名	菊原、医院 様		TEL：0893-26-0103
所在地	愛媛県大洲市八幡町甲 97-1		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	平成 29 年 1 月 17 日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

3/25 (土) ョウパネル 起動不良 (通電ランプ 赤点灯)

給水ホース OED-1000S 側で水浸れ *

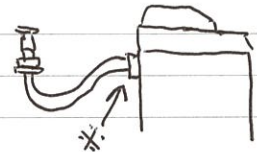

不具合原因、作業内容

ョウパネルの故障が原因で、これを交換して復旧しました。

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 645
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.73 ppm
水漏れ確認	正常 ☒ 給水ホース OED 側増設	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒ 3-スなし
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

→ コンセントを抜く場合、背面の電源スイッチを先に切ってください。

装置情報	交換後運転回数： 3	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌/消毒： 2	殺菌/消毒+7L： 1
	リークチェック： 1	自己洗浄： 1	アルコール単独： 0	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒		吸盤		☐	
排水栓		☐		接続コネクタ：水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☐		接続コネクタ：チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☐		ョウパネル		☒	1
オゾンセンサー		☐				☐	

お客様ご確認署名欄

年 月 日

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名

印

修理業者

株式会社 IHI シンパウラ

岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6

TEL:086-944-6528

責任技術者

作業者



H29.3.27

