

保守点検・修理 報告書

機器名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ Ver. 3.1	製造番号: 300881
サブマニュアル	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒ Ver. 3.1	作業日: 2021年11月9日
Ver (版番号)	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐ Ver. 1.0	作業時間: 1.5 Hr
顧客名	徳山病院 様	
所在地	山口県周布市新宿通1-16	
販売店	富士フィルム・メディカル (株) 山口営業所 様	
納入年月日	2016 年 5 月 30 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 5 年 3 回目 定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容	異常履歴 ☒ 有 ☐ 無	シャワー ☒ 有 ☐ 無
ウォーミングアップ中から立ち上がり時	E202 消毒時水異常	分解 ☒ 有・無
(オゾン水濃度計不具合)	E101 消毒槽異常	
定期保守点検 (5年目)	E200 酸素圧力異常2	

不具合原因、作業内容

下記部品交換、試運転実施

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 305
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールドチューブ	正常 ☒
		プログラムver	正常 ☒ Ver 0207/ T02C

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

ウォーミングアップ中から立ち上がり時不具合の原因は、オゾン水濃度計不具合に由来していた。
定期保守点検に含める部品の為、保守作業にて対応。その他特に異常は発生していません。

装置情報	交換後運転回数: 1093	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌/消毒: 12048	殺菌/消毒+7L: 1846
	リークチェック: /	自己洗浄: 406	アルコール単独: 116	エア単独: /

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒	1	マニホールドチューブ	☐	一式
交換後No 10120502			濃度計フィルター	☒	1	排水フィルター 旧・新	☐	1
オゾンセンサー	☒	1	排水栓	☒	1	給水フィルター	☐	1
No 190207-004			水槽側コネクタ	☒	2	基板	☐	1
	☐		チューブ側コネクタ	☒	2	タッチパネル	☐	1
	☐		吸盤	☒	3		☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用致しません。

ご署名

T9 10

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
広島県広島市西区庚午中4-10-36
TEL: 082-275-0740

責任技術者	作業者
増原	青木