

保守点検・修理 報告書

機器名	オゾン水内視鏡殺菌機	OED-1000	☐	Ver. 3.1	製造番号: 301249 右
サービスマニュアル	オゾン水内視鏡消毒機	OED-1000S	☒	Ver. 3.1	作業日: 2021年12月17日
Ver (版番号)	オゾン水内視鏡洗浄消毒機	OED-1000S Plus	☐	Ver. 1.0	作業時間: 1.0 Hr
顧客名	広島中央健診所 様				TEL: 082-228-1177
所在地	広島市中区八丁堀10-10				ご担当 宮田 様
販売店	株式会社エバルス 様				ご担当 末田 様
納入年月日	2017 年 8 月 24 日	保証期間	内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☐	総合点検 ☒	年 回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容	異常履歴	有 ☒ 無 ☐	シャワー	有 ☒ 無 ☐
・ 総合保守点検 (2回目)			分解	有 ☒ 無 ☐
・ ※今回無償対応 (回数増加に伴い調整)				

不具合原因、作業内容
・ 下記部品交換

点検項目	
フタロック	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒
水漏れ確認	正常 ☒
清掃	正常 ☒
トレイ	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒
殺菌槽 LED	正常 ☒
エアライン	正常 ☒
オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 917
排水栓、排水ライン	正常 ☒
細管送水ライン	正常 ☒
排気ライン	正常 ☒
オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
異常音、振動	正常 ☒
電源コード	正常 ☒
殺菌チューブ類	正常 ☒
マニホールドチューブ	正常 ☒
プログラム ver	正常 ☒ Ver 0209/1705c

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項
10月25日までに完了しています。

装置	交換後運転回数: 1654	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌/消毒: 11.3/0	殺菌/消毒+アル: 3858
情報	リークチェック: 5.838	自己洗浄: 1060	アルコール単独: 152	エア単独: 3

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒	1	マニホールドチューブ	☐	一式
交換後No			濃度計フィルター	☒	1	排水フィルター 旧・新	☐	1
オゾンセンサー	☒	1	排水栓	☒	1	給水フィルター	☐	1
No			水槽側コネクタ	☒	2	基板	☐	1
水フィルター ◆Plus	☐		チューブ側コネクタ	☒	2	タッチパネル	☐	1
エアフィルター ◆Plus	☐		吸盤	☐	3	10-10	☒	1

お客様ご確認署名欄
・ 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・ 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用致しません。
ご署名 宮田 恵子

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
 広島県広島市西区庚午中4-10-36
 TEL: 082-275-0740

責任技術者	作業者
増原	