

保守点検・修理 報告書

管理 No.

機器名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ Ver. 3.1	製造番号: 300733
サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒ Ver. 3.1	作業日: 2021年12月22日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐ Ver. 1.0	作業時間: / Hr
顧客名	山内 内科 様	TEL: 0832-57-1570
所在地	下関市一の宮本町 2-4-6	ご担当 様
販売店	エスエスアルフレックス (株) 下関 様	ご担当 西本 様
納入年月日	2015 年 12 月 11 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 6 年 4 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容	異常履歴	有 ☒ 無 ☐	シャワー	有 ☒ 無 ☐
保守点検 (6年目)			分解	有 ☒ 無 ☐

不具合原因、作業内容
下記記号品交換 試運転実施

点検項目	
フタロック	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒
水漏れ確認	正常 ☒
清掃	正常 ☒
トレイ	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒
殺菌槽 LED	正常 ☒
エアライン	正常 ☒
オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 700
排水栓、排水ライン	正常 ☒
細管送水ライン	正常 ☒
排気ライン	正常 ☒
オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
異常音、振動	正常 ☒
電源コード	正常 ☒
殺菌チューブ類	正常 ☒
マニホールドチューブ	正常 ☒
プログラム ver	正常 ☒ Ver 0207/T02C

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

特に異常等ご指摘ありません。リモコンも正常に使用頂いております。

装置 情報	交換後運転回数: 95	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌/消毒: 117	殺菌/消毒+アル: 1333
	リークチェック: 343	自己洗浄: 314	アルコール単独: 1	エア単独: 1

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒	1	マニホールドチューブ	☐	一式
交換後No 16082476			濃度計フィルター	☒	1	排水フィルター 旧・新	☐	1
オゾンセンサー	☒	1	排水栓	☒	1	給水フィルター	☐	1
No 161017-004			水槽側コネクタ	☒	2	基板	☐	1
	☐		チューブ側コネクタ	☒	2	タッチパネル	☐	1
	☐		吸盤	☒	3		☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用致しません。

ご署名

五嶋 里絵

修理業者

新鋭工業 株式会社 広島支店
広島県広島市西区庚午中4-10-36
TEL: 082-275-0740

責任技術者

増原

作業者

青木