

保守点検・修理 報告書

機器名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ Ver. 3.1	製造番号: 100781
サービスマニュアル	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐ Ver. 3.1	作業日: 2021年12月21日
Ver (版番号)	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐ Ver. 1.0	作業時間: / Hr
顧客名	北村 フリニッ 様	TEL: 0836-21-5906
所在地	山口県 宇部市 松山町 2-6-32	ご担当 様
販売店	海井医科器械 (株) 宇部営業所 様	ご担当 小島 様
納入年月日	2014 年 8 月 7 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 7 年 7 回目 定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容	異常履歴 有 ☒ 無 ☐	シャワー 有 ☒ 無 ☐
保守点検 (7 年目)		分解 ☒ 有 ☐ 無 ☐

不具合原因、作業内容
下記部品交換・試運転実施。

点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ パルス数 761
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒	電源コード 正常 ☒
トレイ 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	マニホールドチューブ 正常 ☒
	プログラム ver 正常 ☒ Ver 0107 / T01.A

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項
特記事項等ございました。11月10日に使用頂きお返しのございます。 来年の8月日曜日の更新のご検討の程宜しくお願ひ致します。

装置情報	交換後運転回数: 495	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌/消毒: 588 /	殺菌/消毒+7L: 2246 /
	リークチェック: 3213	自己洗浄: 888	アルコール単独: 57	エア単独: /

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒	1	マニホールドチューブ	☐	一式
交換後No 170k0028			濃度計フィルター	☒	1	排水フィルター 旧・新	☐	1
オゾンセンサー	☒	1	排水栓	☒	1	給水フィルター	☐	1
No 161003-007			水槽側コネクタ	☒	2	基板	☐	1
	☐		チューブ側コネクタ	☒	2	タッチパネル	☐	1
	☐		吸盤	☒	3		☐	

お客様ご確認署名欄
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用致しません。
ご署名 下川