

保守点検・修理 報告書

機器名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ Ver. 3.1	製造番号: 300441
サービスマニュアル	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒ Ver. 3.1	作業日: 2022年/月20日
Ver (版番号)	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐ Ver. 1.0	作業時間: 1.5 Hr
顧客名	三田尻病院 様	
所在地	山口県防府市 お茶屋町 3-27	
販売店	(株) 特殊ガス商会 様	
納入年月日	2015年2月2日	保証期間 内 ☐ 外 ☒
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 7年7回目 定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容	異常履歴 ☒ 有 ☐ 無	シャワー ☒ 有 ☐ 無
保守点検 (7年目)	4/12~14 排水管(E111)	分解 有・無
	4/14 排水異常1(E401)	⇒ 2021年4月15日
	4/15 排水異常2(E402)	対応済み

不具合原因、作業内容
下記部品の交換、試運転実施。

点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ パルス数 382
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒	電源コード 正常 ☒
トレー 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	マニホールドチューブ 正常 ☒
	プログラムver 正常 ☒ Ver 02071 T02C

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項
特に問題等ありませんでした。いつもキレイに使用して頂きありがとうございます。

装置 情報	交換後運転回数: 1197	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌/消毒: 135/6	殺菌/消毒+アル: 14350
	リークチェック: 2859	自己洗浄: 1527	アルコール単独: 116	エア単独: 4

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒	1	マニホールドチューブ	☐	一式
交換後No 11010550			濃度計フィルター	☒	1	排水フィルター 旧・新	☐	1
オゾンセンサー	☒	1	排水栓	☒	1	給水フィルター	☐	1
No 200511-004			水槽側コネクタ	☐	2	基板	☐	1
	☐		チューブ側コネクタ	☐	2	タッチパネル	☐	1
	☐		吸盤	☒	3		☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用致しません。

ご署名 水津 芳江

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
広島県広島市西区庚午中4-10-36
TEL: 082-275-0740

責任技術者	作業者
増原	青木