

保守点検・修理 報告書

機器名	オゾン水内視鏡殺菌機	OED-1000	☐	Ver. 3.1	製造番号:	500064
サビ・アスベスト Ver (版番号)	オゾン水内視鏡消毒機	OED-1000S	☐	Ver. 3.1	作業日:	2022年1月25日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機	OED-1000S Plus	☒	Ver. 1.0	作業時間:	1 Hr
顧客名	加納内科消化器科			様	TEL:	0848-47-3200
所在地	広島県尾道市高須町3659-1			様	ご担当	様
販売店	福山医療器株式会社			様	ご担当	岩清水 様
納入年月日	2019 年 1 月 16 日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品		
作業区分	保守点検	☒	総合点検	☐	3 年 3 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理	☐	点検のみ	☐	その他	☐
					修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容	異常履歴	有 ☒ 無 ☐	シャワー分解	有 ☒ 無 ☐
・保守点検				
不具合原因、作業内容				
・2022年度保守点検実施				
・水圧 0.55				

点検項目						
フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒	
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒	
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒	バルス数 670
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒	
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒	
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒	
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒	履歴 0.76 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒	
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒	
トレー	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒	
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールドチューブ	正常	☒	
			プログラムVer	正常	☒	Ver 03041712A

作業結果 (完了) 暫定処理など、連絡事項、特記事項

特に問題等はないため、1ヶ月以内に使用頂くようお願いいたします。

装置情報	交換後運転回数:	209	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌/消毒:	815	殺菌/消毒+7w:	6081606	
	リークチェック:	609	自己洗浄:	550	7w-1w単独:	0	エア単独:	3

交換部品名称	交換数量	交換部品名称	交換数量	交換部品名称	交換数量
オゾン水濃度計	☒ 1	オゾン分解触媒	☒ 1	マニホールドチューブ	☐ 一式
交換後No 18093191		濃度計ファイルター	☒ 1	排水ファイルター 旧・新	☐ 1
オゾンセンサ	☒ 1	排水栓	☒ 1	給水ファイルター	☒ 1
No 150210-001		水槽側コネクタ	☐ 2	基板	☐ 1
水ファイルター	☒ 1	チューブ側コネクタ	☐ 2	タッチパネル	☐ 1
エアファイルター	☐ 1	吸盤	☒ 3		☐

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用致しません。

ご署名

加納 俊彦

修理業者

新鋭工業 株式会社 広島支店
広島県広島市西区庚午中4-10-36
TEL: 082-275-0740

責任技術者

増原

作業者

鈴木