

## 保守点検・修理 報告書

|       |                                                                                                                                               |                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 機 器 名 | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 <input type="checkbox"/>                                                                                                  | 製造番号: 300038     |
|       | オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                      | 作業日: 2021年5月14日  |
|       | オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus <input type="checkbox"/>                                                                                          | 作業時間: 1.0 Hr     |
| 顧 客 名 | 角医院 様                                                                                                                                         | TEL 0823-56-0508 |
| 所 在 地 | 呉市音戸町藤脇2-19-3                                                                                                                                 | ご担当 戸高 様         |
| 販 売 店 | (有)平原商会 様                                                                                                                                     | ご担当 有谷 様         |
| 納入年月日 | 2013 年 6 月 4 日 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/>                                                          | 付属品              |
| 作業区分  | 保守点検 <input type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目 定期点検シール記入 <input type="checkbox"/>                                           |                  |
| 出張・引取 | 修 理 <input checked="" type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 修理表示貼付 <input checked="" type="checkbox"/> |                  |

|                             |      |     |       |     |
|-----------------------------|------|-----|-------|-----|
| 不具合状況、依頼内容                  | 異常履歴 | 有・無 | シャワー  | 有・無 |
| ・オゾン水生成注意、異常（履歴：4月初旬より注意多発） |      |     | 分解    | 有・無 |
|                             |      |     | 給・排水F | 有・無 |

|                           |
|---------------------------|
| 不具合原因、作業内容                |
| ・脱気フィルター詰まりの為、エラー発生（交換済み） |
| ・オゾナイザー、濃度計交換             |

|                                               |                                                           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 点検項目                                          |                                                           |
| フタロック 正常 <input checked="" type="checkbox"/>  | 殺菌槽 LED 正常 <input checked="" type="checkbox"/>            |
| 酸素ライン 正常 <input type="checkbox"/>             | エアライン 正常 <input type="checkbox"/>                         |
| アルコールライン 正常 <input type="checkbox"/>          | オゾン水濃度計動作 正常 <input checked="" type="checkbox"/> パルス数 590 |
| オゾンセンサ 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 排水栓、排水ライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>          |
| 給水ライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>  | 細管送水ライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>            |
| 濃度計流量 正常 <input type="checkbox"/>             | 排気ライン 正常 <input type="checkbox"/>                         |
| 水位センサー 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン濃度 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.70 ppm  |
| 水漏れ確認 正常 <input checked="" type="checkbox"/>  | 異常音、振動 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 清掃 正常 <input type="checkbox"/>                | 電源コード 正常 <input checked="" type="checkbox"/>              |
| トレイ 正常 <input checked="" type="checkbox"/>    | 殺菌チューブ類 正常 <input type="checkbox"/>                       |
| 殺菌槽コネクタ 正常 <input type="checkbox"/>           | マニホールドチューブ 正常 <input type="checkbox"/>                    |
|                                               | プログラムver 正常 <input type="checkbox"/> Ver /                |

|                                 |
|---------------------------------|
| 作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項       |
| ※9月メンテ時、給水フィルター再度取付（ASSYは現場に有り） |

|          |          |                |          |           |
|----------|----------|----------------|----------|-----------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数: | 更新（リセット）実施・未実施 | 殺菌/消毒:   | 殺菌/消毒+アル: |
|          | リークチェック: | 自己洗浄:          | アルコール単独: | エア単独:     |

| 交換部品名称  | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称    | 交換                       | 数量 | 交換部品名称      | 交換                       | 数量 |
|---------|-------------------------------------|----|-----------|--------------------------|----|-------------|--------------------------|----|
| オゾン水濃度計 | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | オゾン分解触媒   | <input type="checkbox"/> | 1  | マニホールドチューブ  | <input type="checkbox"/> | 一式 |
| 交換後No   |                                     |    | 濃度計フィルター  | <input type="checkbox"/> | 1  | 排水フィルター 旧・新 | <input type="checkbox"/> | 1  |
| オゾンセンサー | <input type="checkbox"/>            | 1  | 排水栓       | <input type="checkbox"/> | 1  | 給水フィルター     | <input type="checkbox"/> | 1  |
| No      |                                     |    | 水槽側コネクタ   | <input type="checkbox"/> | 2  | 基板          | <input type="checkbox"/> | 1  |
| オゾナイザー  | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | チューブ側コネクタ | <input type="checkbox"/> | 2  | タッチパネル      | <input type="checkbox"/> | 1  |
| 脱気フィルター | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 吸盤        | <input type="checkbox"/> | 3  |             | <input type="checkbox"/> |    |

|                                  |
|----------------------------------|
| お客様ご確認署名欄                        |
| ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。  |
| ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用致しません。 |
| ご署名                              |

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店  
広島県広島市西区庚午中4-10-36  
TEL: 082-275-0740

| 責任者 | 作業者 |
|-----|-----|
| 増原  | 松本  |