

保守点検・修理 報告書

管理 No.

20210212

発行日:

2021 年 2 月 12 日

販売名 サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ Ver. 3.1 オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐ Ver. 3.1 オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☒ Ver. 1.0	製造番号 500465 (右) 作業年月日 2021 年 2 月 12 日 作業時間 Hr
顧客名	三次地区医療センター 様	TEL: 0824-62-1103
所在地	広島県三次市十日市東3丁目16-1	ご担当 様
販売店		ご担当 様
納入年月日	2020 年 1 月 23 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 1 年 1 回目 定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

令和 3 年 定期保守点検

9/17, 10/21, 10/23 消毒時給水異常 (E202)

不具合原因、作業内容

コードにカガ
かかっていたので
上へ下へ変えました。

点検項目

フタロック	正常 ☒	水槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 663
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒ 外付フィルタ 撤去	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.75 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒ テーブルタップ取直し変更
トレイ	正常 ☒	殺菌/消毒 チューブ類	正常 ☒
水槽側コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 0303 / T12A

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

異常ありませんでした

装置 情報	交換後運転回数: 1256 更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌/消毒: 589 / 587	殺菌/消毒+7# : 667 / 647
	リークチェック: 648 自己洗浄: 255	アルコール単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☐	吸盤	☐
交換後 No. 18033095			排水栓	☐	エアフィルター	☒
オゾンセンサー	☒	1	接続コネクタ; 水槽側	☐	水フィルター	☒
130619-013			接続コネクタ; チューブ側	☐		☐
☐			オゾン水濃度計用フィルタ	☐		☐

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2021 年 2 月 12 日

ご署名 福岡 真理子 印

修理業者

株式会社 IHI アグリテック (旧社名 IHI シパウラ)
岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6
TEL: 086-944-6528

責任技術者

作業者



中澤