

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 2021 年 4 月 26 日

販売名 / サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ Ver. 3.1	製造番号 300822
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒ Ver. 3.1	作業年月日 2021 年 4 月 26 日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐ Ver. 1.0	作業時間 Hr
顧客名	吉野内科 様	TEL: 089-979-5123
所在地	愛媛県松山市平田町 19-2	ご担当 様
販売店	愛媛県松山市平田町 19-2	ご担当 様
納入年月日	2016 年 3 月 29 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☒	

依頼内容

4/26 水温高異常 (E206) ... 給水の水温が 50℃ 以上で発生します

作業内容

コントロール基板の水温で検知する回路が故障していたので
これを交換しました。

点検項目

フタロック	正常 ☒	水槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒ 残り 11 MPa	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☐	オゾン水濃度計動作	正常 ☐ パルス数
オゾンセンサ	正常 ☐	排水栓、排水ライン	正常 ☐
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☐
濃度計流量	正常 ☐	排気ライン	正常 ☐
水位センサー	正常 ☐	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☐	異常音、振動	正常 ☐
清掃	正常 ☐ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☐
トレイ	正常 ☐	殺菌/消毒 チューブ類	正常 ☐
水槽側コネクタ	正常 ☐	マニホールド周辺チューブ	正常 ☐
	☐	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 0209 / TOSC

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

・保守点検では度々部品が壊れていました。・履歴データバックアップ
・アルコール缶キャップ予備品お渡し

装置 情報	交換後運転回数: 6	更新 (リセット) 実施: 未実施	殺菌/消毒: 171 /	殺菌/消毒+7M: 1023 /
	リークチェック: 1180	自己洗浄: 805	7Mコ-ル単独: 6	エア単独: 6

交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☐	
交換後 No.		
オゾンセンサー	☐	
	☐	

交換部品名称	交換・数量
オゾン分解触媒	☐
排水栓	☐
接続コネクタ: 水槽側	☐
接続コネクタ: チューブ側	☐
オゾン水濃度計用フィルタ	☐

交換部品名称	交換・数量
吸盤	☐
コントロール基板	☒ 1
	☐
	☐
	☐

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ホカ-控 2021 年 4 月 26 日

ご署名

吉野 内科

印

修理業者

株式会社 IHI アグリテック (旧社名 IHI シバウラ)
岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6
TEL: 086-944-6528

責任技術者

作業者

R03.4.26



中澤