

保守点検・修理 報告書

機 器 名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐	製造番号: 300263
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	作業日: 2021年6月22日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐	作業時間: 1.0 Hr
顧 客 名	たかば内科医院 様	TEL 0824-44-205
所 在 地	三好市三良坂町三良坂1096-3	ご担当 様
販 売 店	TSA (株) 三好 様	ご担当 川本 様
納入年月日	2014年9月8日	保証期間 内 ☐ 外 ☒
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 6年5回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☒

不具合状況、依頼内容	異常履歴	有・無	シャワー	有・無
・タッチパネルフリーズ	RAI ?		分解	有・無
・保守点検 (前回: 2019年4月8日)			給・排水F	有・無

不具合原因、作業内容	・下記部品交換	・使用Ver. UP (USB不具合)	・タッチパネル修理 (ハウジング)
※不具合部品は点検費用に含まれます (4-75)			

点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールドチューブ	正常 ☒
		プログラムver	正常 ☒ Ver 02091 ToKc

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項	交換後材料は回収してあります。タッチパネル故障為記入です。
----------------------------	-------------------------------

装置	交換後運転回数:	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌/消毒:	殺菌/消毒+アル:
情報	リークチェック:	自己洗浄:	アルコール単独:	エア単独:

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒	1	マニホールドチューブ	☐	一式
交換後No 16032238			濃度計フィルター	☒	1	排水フィルター 旧・新	☐	1
オゾンセンサー	☒	1	排水栓	☒	1	給水フィルター	☐	1
No 120911-026			水槽側コネクタ	☐	2	基板	☒	1
	☐		チューブ側コネクタ	☒	2	タッチパネル	☒	1
	☐		吸盤	☒	3	T/L2-16ヤング (青)	☒	1

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用致しません。

ご署名



修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
 広島県広島市西区庚午中4-10-36
 TEL: 082-275-0740

責任技術者

作業者

増原

松本