

保守点検・修理 報告書

機器名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐	Ver. 3.1	製造番号: 300545
サービスマニュアル	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	Ver. 3.1	作業日: 2021年6月30日
Ver (版番号)	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐	Ver. 1.0	作業時間: 2 Hr
顧客名	おおどの診療所 様		TEL: 083-922-0299
所在地	山口県 山口市 石観音町 4-4		ご担当 様
販売店	ティーエスアルフレック (株) 様		ご担当 夷島 様
納入年月日	2015 年 4 月 16 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 6 年 6 回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容	異常履歴 ☒ 有 ☐ 無	シャワー ☒ 有 ☐ 無
保守点検	酸素圧力異常 (E:200) 119	分解 ☒ 有 ☐ 無

不具合原因、作業内容
下記部品の交換・試運転実施

点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 597
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.67 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒ 6月	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールドチューブ	正常 ☒ 交換済み
		プログラムver	正常 ☒ Ver 0205 / T02C

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項
特に異常等ご指摘ありません。12月キレインに使用頂きありがとうございます。

装置	交換後運転回数: 260	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌/消毒: 1245	殺菌/消毒+アル: 11462
情報	リークチェック: 1694	自己洗浄: 385	アルコール単独: 0	エア単独: 4

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒	1	マニホールドチューブ	☒	一式
交換後No 52002033			濃度計フィルター	☒	1	排水フィルター 旧・新	☐	1
オゾンセンサー	☒	1	排水栓	☒	1	給水フィルター	☐	1
No 120508-002			水槽側コネクタ	☒	2	基板	☐	1
	☐		チューブ側コネクタ	☒	2	タッチパネル	☐	1
	☐		吸盤	☒	3	鉗子キャップ	☒	1

お客様ご確認署名欄
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用致しません。
ご署名 白魚岡 由美子

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
 広島県広島市西区庚午中4-10-36
 TEL: 082-275-0740

責任技術者	作業者
増原	青木