

## 保守点検・修理 報告書

|           |                                                                                        |                                                                       |                   |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 機器名       | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 <input type="checkbox"/>                                           | Ver. 3.1                                                              | 製造番号: 300858      |
| サービスマニュアル | オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S <input checked="" type="checkbox"/>                               | Ver. 3.1                                                              | 作業日: 2021年7月4日    |
| Ver (版番号) | オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus <input type="checkbox"/>                                   | Ver. 1.0                                                              | 作業時間: 1.5 Hr      |
| 顧客名       | たかおクリニック 様                                                                             |                                                                       | TEL: 083-282-8040 |
| 所在地       | 山口県下関市小月市原町1-3                                                                         |                                                                       | ご担当 様             |
| 販売店       | (株)セイエル 様                                                                              |                                                                       | ご担当 様             |
| 納入年月日     | 平成28年4月7日                                                                              | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> | 付属品               |
| 作業区分      | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 5年3回目           | 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/>                         |                   |
| 出張・引取     | 修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> | 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>                                       |                   |

|                     |                                                                       |                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 不具合状況、依頼内容          | 異常履歴 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | シャワー <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 |
| 光量低下異常1発生におき 保守点検実施 | 尿水汚れ異常 (E209)                                                         | 分解 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無   |
|                     | 光量低下異常1 (E210)                                                        |                                                                       |
|                     | タンク内水異常 (E212)                                                        |                                                                       |

|              |
|--------------|
| 不具合原因、作業内容   |
| 下記部品交換 試運転実施 |

| 点検項目     |                                        |            |                                                       |
|----------|----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|
| フタロック    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 殺菌槽 LED    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                |
| 酸素ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | エアライン      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                |
| アルコールライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン水濃度計動作  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> パルス数 412       |
| オゾンセンサ   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 排水栓、排水ライン  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                |
| 給水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 細管送水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                |
| 濃度計流量    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 排気ライン      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                |
| 水位センサー   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン濃度      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.67 ppm    |
| 水漏れ確認    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 異常音、振動     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                |
| 清掃       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 電源コード      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                |
| トレー      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 殺菌チューブ類    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                |
| 殺菌槽コネクタ  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | マニホールドチューブ | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                |
|          |                                        | プログラムver   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> Ver 0207/ T02C |

|                            |
|----------------------------|
| 作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項 |
| 交換後 特に異常ありませんでした。          |
| いつもキレイに使用 頂いております。         |

|    |              |                                                                                |            |                |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| 装置 | 交換後運転回数: 305 | 更新 (リセット) 実施 <input checked="" type="checkbox"/> ・未実施 <input type="checkbox"/> | 殺菌/消毒: 16  | 殺菌/消毒+アル: 1555 |
| 情報 | リークチェック: 0   | 自己洗浄: 180                                                                      | アルコール単独: 1 | エア単独: 1        |

| 交換部品名称         | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称    | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称      | 交換                       | 数量 |
|----------------|-------------------------------------|----|-----------|-------------------------------------|----|-------------|--------------------------|----|
| オゾン水濃度計        | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | オゾン分解触媒   | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | マニホールドチューブ  | <input type="checkbox"/> | 一式 |
| 交換後No 1408/080 |                                     |    | 濃度計フィルター  | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 排水フィルター 旧・新 | <input type="checkbox"/> | 1  |
| オゾンセンサー        | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 排水栓       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 給水フィルター     | <input type="checkbox"/> | 1  |
| No 210121-008  |                                     |    | 水槽側コネクタ   | <input checked="" type="checkbox"/> | 2  | 基板          | <input type="checkbox"/> | 1  |
|                | <input type="checkbox"/>            |    | チューブ側コネクタ | <input checked="" type="checkbox"/> | 2  | タッチパネル      | <input type="checkbox"/> | 1  |
|                | <input type="checkbox"/>            |    | 吸盤        | <input checked="" type="checkbox"/> | 3  |             | <input type="checkbox"/> |    |

|                                  |                                                                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| お客様ご確認署名欄                        | <br>ご署名 |
| ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。  |                                                                                             |
| ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用致しません。 |                                                                                             |

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店  
 広島県広島市西区庚午中4-10-36  
 TEL: 082-275-0740

|       |     |
|-------|-----|
| 責任技術者 | 作業者 |
| 増原    | 青木  |