

保守点検・修理 報告書

機 器 名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐	製造番号 : 300630
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	作業日 : 2021年8月17日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐	作業時間 : 1.0 Hr
顧 客 名	妹尾病院 様	TEL 082-878-5111
所 在 地	広島市安佐南区相田1-10-21	ご担当 岡崎 様
販 売 店	(株)中村酸素 様	ご担当 南部 様
納入年月日	2015 年 8 月 31 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 6 年 6 回目 定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修 理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容	異常履歴	シャワー
・保守点検	有・無 ☒ 有・無 ☒	有・無 ☒ 有・無 ☒
	分解	有・無 ☒ 有・無 ☒
	給・排水F	有・無 ☒ 有・無 ☒

不具合原因、作業内容	
・下記部品交換	全交換...水漏れ高...とくに発生した箇所

点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒ 406	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ パルス数 32
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒ 62P
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.67 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒	電源コード 正常 ☒
トレー 正常 ☒ 全交換あり	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	マニホールドチューブ 正常 ☒
	プログラムver 正常 ☒ Ver 2021/10/20

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項
1-7号機→オゾンセンサ交換後、殺菌槽、マニホールドチューブ交換完了。連絡下さい。

装置 情報	交換後運転回数 : 254	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌/消毒 : 25	殺菌/消毒+アル : 1823
	リークチェック : 0	自己洗浄 : 226	アルコール単独 : 0	エア単独 : 0

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒	1	マニホールドチューブ	☐	一式
交換後No 16042278			濃度計フィルター	☒	1	排水フィルター 旧・新	☐	1
オゾンセンサー	☒	1	排水栓	☒	1	給水フィルター	☐	1
No 2103/0-008			水槽側コネクタ	☒	2	基板	☐	1
	☐		チューブ側コネクタ	☒	2	タッチパネル	☐	1
	☐		吸盤	☒	3		☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用致しません。

ご署名

岡崎

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
 広島県広島市西区庚午中4-10-36
 TEL : 082-275-0740

責任者

作業者

増原

松本