

保守点検・修理 報告書

機器名	オゾン水内視鏡殺菌機	OED-1000	☐	Ver. 3.1	製造番号: 500343
サービスマニュアル	オゾン水内視鏡消毒機	OED-1000S	☐	Ver. 3.1	作業日: 2021年8月19日
Ver (版番号)	オゾン水内視鏡洗浄消毒機	OED-1000S Plus	☒	Ver. 1.0	作業時間: 1 Hr
顧客名	伊田 クリニック 様				TEL: 0833-74-2960
所在地	山口県光市島田 1-1-21				ご担当 様
販売店	ファーストリフレック(株) 周南支店 様				ご担当 高石 様
納入年月日	2019年7月8日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	2年2回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容	異常履歴	有・無	シャワー	有・無
保守点検 (2年目)			分解	有・無

不具合原因、作業内容
下記部品の交換 試運転を実施

点検項目	
フタロック	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒
水漏れ確認	正常 ☒
清掃	正常 ☒
トレイ	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒
殺菌槽 LED	正常 ☒
エアライン	正常 ☒
オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 700
排水栓、排水ライン	正常 ☒
細管送水ライン	正常 ☒
排気ライン	正常 ☒
オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
異常音、振動	正常 ☒
電源コード	正常 ☒
殺菌チューブ類	正常 ☒
マニホールドチューブ	正常 ☒
プログラムver	正常 ☒ Ver 0304/T12A

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

特に異常等はないと確認、大変スムーズに御使用頂きありがとうございます。

装置 情報	交換後運転回数: 33	更新 (リセット) 実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌/消毒: 1/1	殺菌/消毒+アル: 1/87
	リークチェック: 98	自己洗浄: 87	アルコール単独: 0	エア単独: 3

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒	1	マニホールドチューブ	☐	一式
交換後No 18043127			濃度計フィルター	☒	1	排水フィルター 旧・新	☐	1
オゾンセンサー	☒	1	排水栓	☒	1	給水フィルター	☒	1
No 131109-013			水槽側コネクタ	☐	2	基板	☐	1
	☐		チューブ側コネクタ	☒	2	タッチパネル	☐	1
	☐		吸盤	☒	3	エアフィルター	☒	1

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用致しません。

ご署名 宮崎

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
広島県広島市西区庚午中4-10-36
TEL: 082-275-0740

責任技術者	作業者
増原	青木