

保守点検・修理 報告書

機器名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ Ver. 3.1	製造番号: 301459
サブマニュアル	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒ Ver. 3.1	作業日: 2021年8月24日
Ver (版番号)	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐ Ver. 1.0	作業時間: 1.5 Hr
顧客名	やまぐち 内科 クリニック 様	TEL: 082-250-2222
所在地	広島市 南区 翠 1-3-10	ご担当 様
販売店	藤井医療器 株式会社 様	ご担当 金泉 様
納入年月日	2018 年 4 月 12 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 3 年 4 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容	異常履歴 ☒ 有 ☐ 無	シャワー ☒ 有 ☐ 無
保守点検実施	消毒剤給水異常 (E202)	分解 ☒ 有 ☐ 無

不具合原因、作業内容	下記部品交換、試運転実施
------------	--------------

点検項目		結果	
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 498
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.67 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールドチューブ	正常 ☒
		プログラムver	正常 ☒ Ver 02071 T03C

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

特に問題は発生していませんでした。1175モーターは使用済み部品と交換しました。

装置 情報	交換後運転回数: 1715 更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌/消毒: 13959	殺菌/消毒+7L: 12108
	リークチェック: 362	自己洗浄: 866	7Lコル単独: 24
		エア単独: 9	

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒	1	マニホールドチューブ	☐	一式
交換後No 51905193			濃度計フィルター	☒	1	排水フィルター 旧・新	☐	1
オゾンセンサー	☒	1	排水栓	☒	1	給水フィルター	☐	1
No 210318-008			水槽側コネクタ	☒	2	基板	☐	1
	☐		チューブ側コネクタ	☒	2	タッチパネル	☐	1
	☐		吸盤	☒	3		☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用致しません。

ご署名

山本 敏 弘

修理業者

新鋭工業 株式会社 広島支店
広島県広島市西区庚午中4-10-36
TEL: 082-275-0740

責任技術者

増原

作業者

青木