

保守点検・修理 報告書

機器名	オゾン水内視鏡殺菌機	OED-1000	☐	Ver. 3.1	製造番号: 500593
サービスマニュアル	オゾン水内視鏡消毒機	OED-1000S	☐	Ver. 3.1	作業日: 2021年10月8日
Ver (版番号)	オゾン水内視鏡洗浄消毒機	OED-1000S Plus	☒	Ver. 1.0	作業時間: 1.5 Hr
顧客名	吉武内科クリニック 様				TEL:
所在地	山口県山陽小野田市厚狭 1041-1				ご担当 様
販売店	(有) 新和医科器械 様				ご担当 様
納入年月日	2020 年 10 月 21 日	保証期間	内 ☒ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	1 年 / 回目		定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐		修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容	異常履歴	シャワー
定期保守点検 (初回無償分)	9/27 E101 消毒槽異常	(有) 無
ボタン入れ対応		(有) 無

不具合原因、作業内容
下記部品交換、試運転実施

点検項目		異常履歴		シャワー	
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒	分解	(有) 無
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒		
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒	パルス数	905
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒		
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒		
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒		
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒	履歴	0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒		
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒		
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒		
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールドチューブ	正常 ☒		
		プログラムver	正常 ☒	Ver	0304 / T12A

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項
特に異常等ございました。ボタン入れは新しい物をお渡し致します。
お試運転もお願い致します。

装置情報	交換後運転回数: 78	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌/消毒: 16	殺菌/消毒+アル: 172
	リークチェック: 78	自己洗浄: 68	アルコール単独: 0	エア単独: 1

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒	1	マニホールドチューブ	☐	一式
交換後No 52001004			濃度計フィルター	☒	1	排水フィルター 旧・新	☐	1
オゾンセンサー	☒	1	排水栓	☒	1	給水フィルター	☐	1
No 180424-005			水槽側コネクタ	☐	2	基板	☐	1
エアーフィルター	☒	1	チューブ側コネクタ	☒	2	タッチパネル	☐	1
水フィルター	☒	1	吸盤	☒	3	ボタン入れ (新)	☒	1

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用致しません。

ご署名

泉

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
 広島県広島市西区庚午中4-10-36
 TEL: 082-275-0740

責任技術者	作業者
増原	青木