

保守点検・修理 報告書

機器名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ Ver. 3.1	製造番号: 301179
サードマニュアル	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒ Ver. 3.1	作業日: 2021年10月7日
Ver (版番号)	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐ Ver. 1.0	作業時間: 2 Hr
顧客名	いとうクリニック 様	TEL:
所在地	広島市西区庚午南1-35-13	ご担当 様
販売店	吉岡メディカル 様	ご担当 吉岡 様
納入年月日	2017 年 6 月 21 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 4 年 2 回目 定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容	異常履歴 ☒ 有 ☐ 無	シャワー ☒ 有 ☐ 無
・保守点検	E402	分解 ☒ 有 ☐ 無
E:212 ランプLED点検	E202	
	E210 E212	

不具合原因、作業内容
・2021年度保守点検実施
E:212は濃度計交換に2対応しております。

点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ パルス数 610
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.74 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒	電源コード 正常 ☒
トレイ 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	マニホールドチューブ 正常 ☒
	プログラムver 正常 ☒ Ver 1

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項
交換後動作に問題ありません。

装置	交換後運転回数: 245	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌/消毒: 110	殺菌/消毒+アル: 1349
情報	リークチェック: 0	自己洗浄: 0	アルコール単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒	1	マニホールドチューブ	☐	一式
交換後No 120711-027			濃度計フィルター	☒	1	排水フィルター 旧・新	☐	1
オゾンセンサー	☒	1	排水栓	☒	1	給水フィルター	☐	1
No 51911323			水槽側コネクタ	☒	2	基板	☒	1
	☐		チューブ側コネクタ	☒	2	タッチパネル	☐	1
	☐		吸盤	☒	3		☐	

お客様ご確認署名欄	
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用致しません。	
ご署名	

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
 広島県広島市西区庚午中4-10-36
 TEL: 082-275-0740

責任技術者	作業者
増原	増原