

## 保守点検・修理 報告書

|       |                                                                                                                               |                  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 機 器 名 | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                       | 製造番号 : 100796    |
|       | オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S <input type="checkbox"/>                                                                                 |                  |
|       | オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus <input type="checkbox"/>                                                                          |                  |
| 顧 客 名 | 市川医院 様                                                                                                                        | TEL 0833-72-5700 |
| 所 在 地 | 山口県光市中央3-2-26                                                                                                                 | ご担当 様            |
| 販 売 店 | 海井医科器械(株)周南 様                                                                                                                 | ご担当 多田 様         |
| 納入年月日 | 2013 年 8 月 23 日 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/>                                         | 付属品              |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 8 年 8 回目 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/> |                  |
| 出張・引取 | 修 理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>       |                  |

|            |      |     |       |     |
|------------|------|-----|-------|-----|
| 不具合状況、依頼内容 | 異常履歴 | 有・無 | シャワー  | 有・無 |
| ・保守点検      |      |     | 分解    | 有・無 |
|            |      |     | 給・排水F | 有・無 |

|            |                  |
|------------|------------------|
| 不具合原因、作業内容 |                  |
| ・下記部品交換    | 給水(給水)パック: 劣化 交換 |
|            | 給水(給水)パック: 交換    |
|            | 給水(給水)パック: 交換    |

| 点検項目     |                                        | 異常履歴       |                                                       |
|----------|----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|
| フタロック    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 殺菌槽 LED    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                |
| 酸素ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | エアライン      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                |
| アルコールライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン水濃度計動作  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> パルス数 558       |
| オゾンセンサ   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 排水栓、排水ライン  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                |
| 給水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 細管送水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                |
| 濃度計流量    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 排気ライン      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                |
| 水位センサー   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン濃度      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.69 ppm    |
| 水漏れ確認    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 異常音、振動     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                |
| 清掃       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 電源コード      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                |
| トレイ      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 殺菌チューブ類    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                |
| 殺菌槽コネクタ  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | マニホールドチューブ | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                |
|          |                                        | プログラムver   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> Ver 01071 T03A |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| 作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項 |  |
|                           |  |

|    |              |                |             |              |
|----|--------------|----------------|-------------|--------------|
| 装置 | 交換後運転回数: 255 | 更新(リセット)実施・未実施 | 殺菌/消毒: 2595 | 殺菌/消毒+7L: 82 |
| 情報 | リークチェック: 0   | 自己洗浄: 1.528    | 7L単独: 0     | エア単独: 1      |

| 交換部品名称         | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称    | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称        | 交換                       | 数量 |
|----------------|-------------------------------------|----|-----------|-------------------------------------|----|---------------|--------------------------|----|
| オゾン水濃度計        | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | オゾン分解触媒   | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | マニホールドチューブ    | <input type="checkbox"/> | 一式 |
| 交換後No 15/02/65 |                                     |    | 脱気フィルター   | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 排水フィルター 旧・新   | <input type="checkbox"/> | 1  |
| オゾンセンサー        | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 排水栓       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 給水フィルター       | <input type="checkbox"/> | 1  |
| No 140516-008  |                                     |    | 水槽側コネクタ   | <input type="checkbox"/>            | 2  | 水フィルター ◆Plus  | <input type="checkbox"/> | 1  |
| 基板             | <input type="checkbox"/>            | 1  | チューブ側コネクタ | <input type="checkbox"/>            | 2  | エアフィルター ◆Plus | <input type="checkbox"/> | 1  |
| タッチパネル         | <input type="checkbox"/>            | 1  | 吸盤        | <input checked="" type="checkbox"/> | 3  |               | <input type="checkbox"/> |    |

## お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用致しません。

ご署名

河岡 智子

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店  
 広島県広島市西区庚午中4-10-36  
 TEL: 082-275-0740

責任者

作業者

増原

松本