

保守点検・修理 報告書

機器名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ Ver. 3.1	製造番号: 100623
サービスマニュアル	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐ Ver. 3.1	作業日: 2021 年 10 月 18 日
Ver (版番号)	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐ Ver. 1.0	作業時間: 2 Hr
顧客名	青木病院 様	TEL: 0823-42-1121
所在地	広島県呉市江田島市中央4丁目17-10	ご担当 様
販売店	株式会社エバルス 様	ご担当 田中 様
納入年月日	2013 年 3 月 11 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 8 年 4 回目 定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容	異常履歴 ☒ 有 ☐ 無	シャワー ☒ 有 ☐ 無
・保守点検	E202 X (2)	分解
31V2-10の洗浄やり直し		

不具合原因、作業内容	(★1本で約10分)
・2021年度保守点検実施	31V2-10 2回、殺菌+31V2-10 1回 動作確認も問題なし

点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 382
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.67 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールドチューブ	正常 ☒
		プログラムver	正常 ☒ Ver 0107 / T03D

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項	特に問題ありませんでした。31V2-10の作は様子を見て頂くようお願い致します。
----------------------------	--

装置	交換後運転回数: 514	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌/消毒: 2001	殺菌/消毒+7L: 2340
情報	リークチェック: 896	自己洗浄: 706	アルコール単独: 19	エア単独: 14

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒	1	マニホールドチューブ	☐	一式
交換後No 13021301			濃度計フィルター	☒	1	排水フィルター 旧・新	☐	1
オゾンセンサー	☒	1	排水栓	☒	1	給水フィルター	☐	1
No 160224-001			水槽側コネクタ	☐	2	基板	☐	1
	☐		チューブ側コネクタ	☐	2	タッチパネル	☐	1
	☐		吸盤	☒	3		☐	

お客様ご確認署名欄	ご署名
- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 - 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用致しません。	静岡 哲美

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
 広島県広島市西区庚午中4-10-36
 TEL: 082-275-0740

責任技術者	作業者
増原	増原