

保守点検・修理 報告書

機器名	オゾン水内視鏡殺菌機	OED-1000	☐	Ver. 3.1	製造番号: 300871
サービスマニュアル	オゾン水内視鏡消毒機	OED-1000S	☒	Ver. 3.1	作業日: 2021年10月22日
Ver (版番号)	オゾン水内視鏡洗浄消毒機	OED-1000S Plus	☐	Ver. 1.0	作業時間: 1.5 Hr
顧客名	内海診療所				TEL: 1895-85-0341
所在地	愛媛県南宇和郡愛南町柏382				ご担当 様
販売店	(株)エヒメ医療器具 宇和島営業所				ご担当 山本 様
納入年月日	年 月 日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	5 年 4 回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容	異常履歴	有 ☒ 無 ☐	シャワー	有 ☒ 無 ☐
保守点検			分解	有 ☒ 無 ☐

不具合原因、作業内容	下記部品の交換
------------	---------

点検項目	
フタロック	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒ 294
アルコールライン	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒
水漏れ確認	正常 ☒
清掃	正常 ☒
トレイ	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒
殺菌槽 LED	正常 ☒
エアライン	正常 ☒
オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 927
排水栓、排水ライン	正常 ☒
細管送水ライン	正常 ☒
排気ライン	正常 ☒
オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
異常音、振動	正常 ☒
電源コード	正常 ☒
殺菌チューブ類	正常 ☒
マニホールドチューブ	正常 ☒
プログラム ver	Ver 02091 Totsu

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項	特に異常はございません。
----------------------------	--------------

装置情報	交換後運転回数: 8	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌/消毒: 130	殺菌/消毒+アル: 125
	リークチェック: 0	自己洗浄: 7	アルコール単独: 0	エア単独: 3

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒	1	マニホールドチューブ	☐	一式
交換後No 9023487			濃度計フィルター	☒	1	排水フィルター 旧・新	☐	1
オゾンセンサー	☒	1	排水栓	☒	1	給水フィルター	☐	1
No 200303-001			水槽側コネクタ	☒	2	基板 (新型)	☒	1
	☐		チューブ側コネクタ	☒	2	タッチパネル	☒	1
	☐		吸盤	☒	3	IS-10 2007-	☒	1

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用致しません。

ご署名

和泉百合

修理業者

新鋭工業 株式会社 広島支店
 広島県広島市西区庚午中4-10-36
 TEL: 082-275-0740

責任技術者

作業者

和泉 百合