

保守点検・修理 報告書

機 器 名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐	製造番号 : 300362
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	作業日 : 2021年10月26日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐	作業時間 : 1.0 Hr
顧 客 名	向井クリニック 様	TEL 0829-50-6166
所 在 地	広島県廿日市市前空5-3-16	ご担当 様
販 売 店	藤井医療器具株式会社 様	ご担当 政村 様
納入年月日	2014 年 8 月 18 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 7 年 5 回目 定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修 理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容	異常履歴	有・無	シャワー	有・無
・保守点検			分解	有・無
			給・排水F	有・無

不具合原因、作業内容
・下記部品交換
排水F Assy 取外し (取下)
排水ホース交換

点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ パルス数 287
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒	電源コード 正常 ☒
トレー 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	マニホールドチューブ 正常 ☒
	プログラムver 正常 ☒ Ver 02041 T02BV

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項
排水ホース基板交換も推奨致し。¥30,000 (税別)

装置	交換後運転回数 : 429	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌/消毒 : 8	殺菌/消毒+アル : 3.672
情報	リークチェック : 286	自己洗浄 : 132	アルコール単独 : 5	エア単独 : 2

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒	1	マニホールドチューブ	☐	一式
交換後No 13061428			脱気フィルター	☒	1	排水フィルター 旧・新	☐	1
オゾンセンサー	☒	1	排水栓	☒	1	給水フィルター	☐	1
No 130730-003			水槽側コネクタ	☐	2	水フィルター ◆Plus	☐	1
基板	☐	1	チューブ側コネクタ	☒	2	エアフィルター ◆Plus	☐	1
タッチパネル	☐	1	吸盤	☒	3		☐	

お客様ご確認署名欄
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用致しません。
ご署名 向井 隆一

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
 広島県広島市西区庚午中4-10-36
 TEL : 082-275-0740

責任者	作業者
増原	松本