

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 26 年 1 月 24 日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号:	300027	
作業年月日	平成 26 年 1 月 24 日		作業時間:	1.0	Hr
顧客名	岡田外科医院 様		TEL:	082-281-2802	
所在地	広島県南区段原山崎2-9-22		担当	様	
販売店	藤井医療器 様		担当	様	
納入年月日	平成 25 年 5 月 1 日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品		
作業区分	保守点検 ☐	総合点検 ☐	年 回目	定期点検シール記入 ☐	
<u>出張・引取</u>	修理 ☒		修理表示貼付	☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴
1/18 11:56 光量低下異常
1/18 11:56 ランプ切れ異常

不具合原因、作業内容
オゾン水濃度計のランプの性能低下が異常原因と考えられます、 現在は正常に動作していますが、急のため交換しました。

点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ パルス数 {交換前 289
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒ {交換後 352
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.73 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード 正常 ☒
トレイ 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	正常 ☐

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数: 139	更新 (リセット) 実施・未実施 ☒	殺菌: 79	殺菌+アル: 60
	リークチェック: 0	自己洗浄: 12	アルコール単独: 4	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☐				☐	
排水栓		☐				☐	
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☐				☐	

お客様ご確認署名欄		年 月 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。		
ご署名 小 藤田恵子 印		

修理業者 株式会社 IHI シバウラ 岡山事業所
岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6
TEL: 086-944-6528

責任技術者	作業者
H26.1.24 	H26.1.24