

保守点検・修理 報告書

機器名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐	Ver. 3.1	製造番号 : 300112
サービスマニュアル	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	Ver. 3.1	作業日 : 2021 年 12 月 13 日
Ver (版番号)	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐	Ver. 1.0	作業時間 : 1 Hr
顧客名	いしねファミリークリニック 様		TEL : 0848-60-6555
所在地	広島県三原市本郷南5-19-15		ご担当 様
販売店	2013 五洋医療器株式会社 様		ご担当 奥永所長 様
納入年月日	2017 年 11 月 25 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 8 年 6 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容	異常履歴 ☒ 有 ☐ 無	シャワー ☒ 有 ☐ 無
・保守点検	E202 X 35 E-200 X 3 E-300 X 1	分解 ☒ 有 ☐ 無

不具合原因、作業内容
・2021年度保守点検実施
★水圧が高い為、E202が多発しております

点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☐	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 348
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールドチューブ	正常 ☒
		プログラムver	正常 ☒ Ver 0207 / T04C

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項
E202 対策として、減圧弁の御検討の程お願い致します その他特に問題ありませんでした。

装置情報	交換後運転回数 : 356	更新 (リセット) 実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌/消毒 : 1352	殺菌/消毒+アル : 1/1
	リークチェック : 32	自己洗浄 : 49	アルコール単独 : 0	エア単独 : 7

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒	1	マニホールドチューブ	☐	一式
交換後No 15012005			濃度計フィルター	☒	1	排水フィルター 旧・新	☐	1
オゾンセンサー	☒	1	排水栓	☒	1	給水フィルター	☐	1
No 130111-015			水槽側コネクタ	☒	2	基板	☐	1
水フィルター ◆Plus	☐		チューブ側コネクタ	☒	2	タッチパネル	☐	1
エアフィルター ◆Plus	☐		吸盤	☒	3		☐	

お客様ご確認署名欄
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用致しません。
ご署名 石根典幸

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
広島県広島市西区庚午中4-10-36
TEL : 082-275-0740

責任技術者	作業者
増原	増原